


Amika® und Amika+


Installation Pumpset




Pumpentür mittels blauem* Griff öffnen.

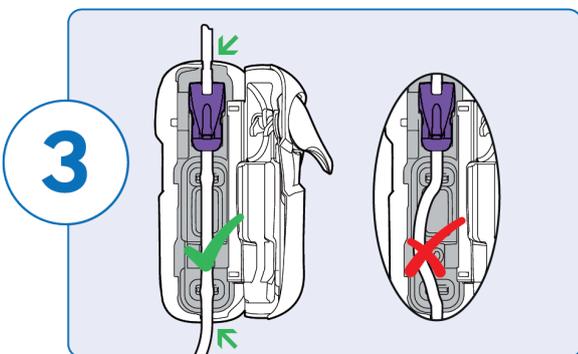


Schlauch in die Führungsritzen einlegen.

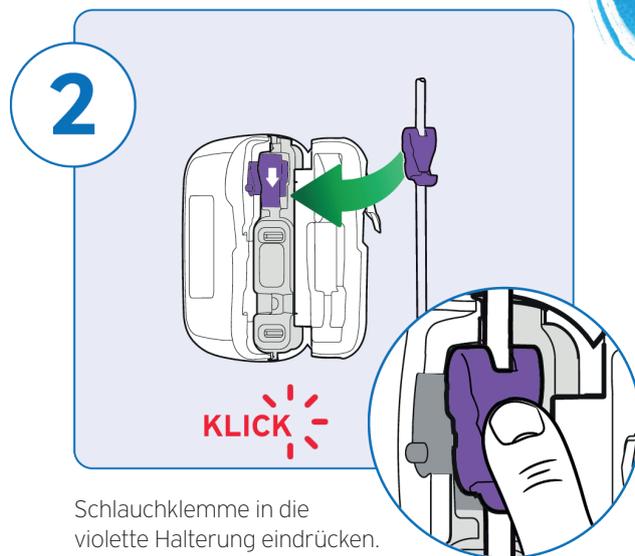

Schlauchklemme in die violette Halterung eindrücken. Beim Einrasten ist ein "Klick" hörbar.

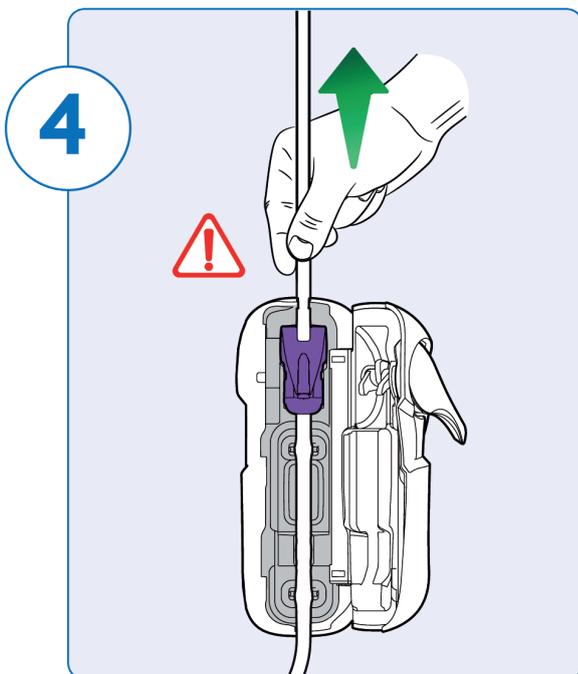

Schlauch leicht nach oben ziehen, um die Schlauchklemme in eine optimale Position zu bringen.

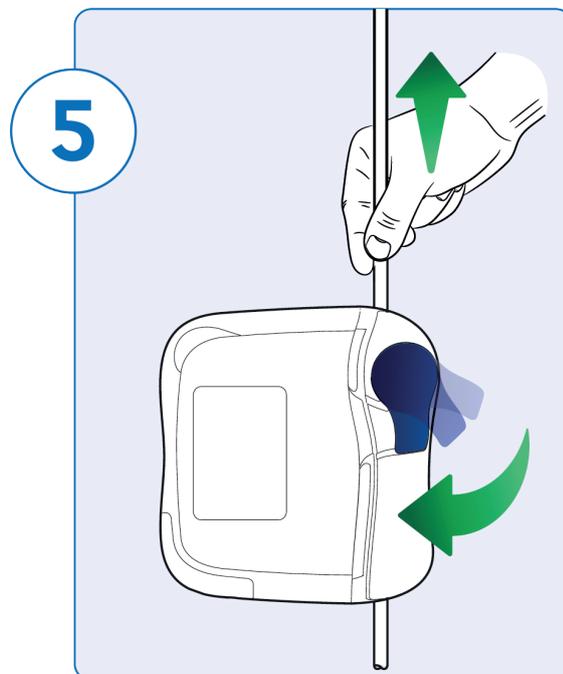

Schlauch leicht gespannt halten und Pumpentür mittels blauem* Griff nach unten verriegeln. Türe nicht zudrücken und keine Kraft anwenden.

* bzw. violetter Griff bei Amika+



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4, 6010 Kriens
www.fresenius-kabi.ch

Telefon 041 552 70 00
InfoLine 0800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com



EN-2022-394/1-d