

Amika®

مضخة التغذية المعوية
دليل مرجعي مصور



ماذا أفعل في حالة...

في حالة انطلاق الإنذار:

كنتم صوت الإنذار (في حالة الضرورة)

اكتشف السبب وقم باتخاذ الإجراء المناسب

استمرار التغذية



إيقاف الإنذار




منبه البدء

استمر إلى الخطوة التالية أو أوقف تشغيل المضخة.



إنذار الإنسداد التحتي

تحقق من عدم انسداد جهاز المضخة / أنبوب التغذية في المنطقة الواقعة بعد المضخة في جانب المريض.

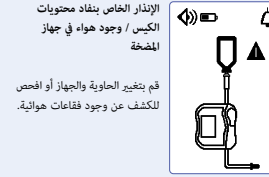

إنذار الغاص بنفاد محتويات الكيس / وجود هواء في جهاز المضخة

قم بتغيير الحاوية والجهاز أو الفحص للكشف عن وجود فقاعات هوائية.



نفاد البطارية

قم بتوصيل مضخة التغذية بمصدر التيار الرئيسي فوراً.



رسالة الاقتراب من الوصول إلى الكمية المستهدفة

استمر في التغذية أو قم بإنهائها.



إنذار الإنسداد العلوي

تحقق من عدم انسداد جهاز المضخة في المنطقة الواقعة بين الحاوية والمضخة.



إنذار فتح الباب

أغلق باب المضخة.



إنذار حدوث عطل في المضخة

قم بتدوين كود العطل الفني (Err xyz) واتصل بالقسم الطبي البيولوجي.



إنذار الوصول إلى الكمية المستهدفة

قم بإنهاء التغذية.



إنذار تركيب جهاز المضخة

افحص موضع جهاز المضخة فوق المضخة وتحته وقم بتركيبه بشكل صحيح.

لترح أي استفسارات أو طلب أي معلومات، يُرجى الاتصال بالرعاية

المنزلية على خط المساعدة المجاني المتاح على مدار اليوم على رقم ٠٨٠٨ ١٠٠ ١٩٩٠

01



أغلق المشبك المنظم الضاغط الموجود في أنبوب الإمداد ثم قم بتوصيله بكيس EasyBag أو الحاوية.

02



افتح باب المضخة.

03



ضع المشبك المنظم الضاغط الموجود في أنبوب الإمداد بحيث يتطابق مع السهم المتجه إلى أسفل حتى "يصدر صوت طقطقة" مستقرًا في مكانه.

04



ضع أنبوب الإمداد بشكل مستقيم داخل موجه الأنبوب.

05



أغلق الباب واضغط إلى أسفل على الذراع حتى يتم تثبيته بإحكام في موضعه.

06



قم بتشغيل مضخة Amika® عن طريق الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.

07



اضغط على مفتاح التحضير التلقائي ثم اضغط على زر البدء.

08



عندما يكتمل التحضير، اضغط على زر البدء مجددًا.

09



اضبط سرعة التدفق المطلوبة عن طريق الضغط على المفاتيح +/- حتى تصل إلى الكمية المطلوبة.

10



اضبط الكمية المستهدفة عن طريق الضغط على المفاتيح +/- حتى تصل إلى الكمية المطلوبة.

11



اضغط على زر البدء لبدء التغذية.

12



اضغط على مفتاح الإيقاف كي توقف التغذية في أي مرحلة. اضغط على مفتاح الإيقاف عندما تنتهي التغذية أو عند الوصول إلى الكمية المستهدفة.

13



إذا كنت تحتاج إلى إعادة ضبط شريط التقدم بعد الوصول إلى الكمية المستهدفة، فاضغط على مفتاح الإيقاف لمدة 2-3 ثوانٍ.

14



لإيقاف تشغيل المضخة، اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل حتى ينتهي العد التنازلي.

