




কী করতে হবে যদি...


যদি অ্যালার্ম বাজে:

 অ্যালার্মের শব্দ বন্ধ করে দিন (যদি প্রয়োজন হয়)

কারণটি খুঁজে বের করুন এবং যথাযথ পদক্ষেপ নিন


 অ্যালার্ম বন্ধ করুন

 ফিডিং করা পুনরায় শুরু করুন

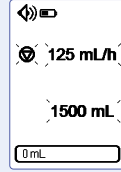


রিমাইন্ডার চালু করুন

পরের ধাপে যান
অথবা পাম্প বন্ধ করুন

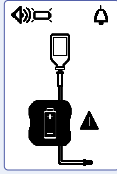


ব্যটারি শেষ

আমেরিকা-এর পাম্পকে
বৈদ্যুতিক লাইনের সাথে জুড়ে
দিন।

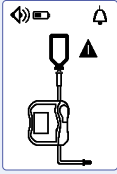


**ব্যাগ খালি/ সেটের মধ্যে
বাতাসের জন্য অ্যালার্ম**

কন্ট্রোলার ও সেট পরিবর্তন
করুন অথবা বাতাসের বুদবুদ
আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।

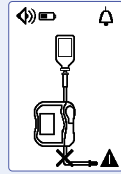


**নির্ধারিত দিকে আটকে যাওয়ার
সতর্কতার অ্যালার্ম**

পাম্পের পরে, রোগীর দিকে পাম্প
সেট/ফিডিং টিউব পরিষ্কার আছে
কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন।

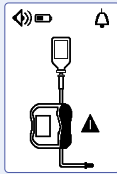


দরজা খোলা থাকার অ্যালার্ম

পাম্পের দরজা বন্ধ করুন।

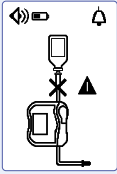


**উপরের দিকে আটকে
যাওয়ার সতর্কতার অ্যালার্ম**

কন্ট্রোলার ও পাম্পের মধ্যের
জায়গায় পাম্প সেট পরিষ্কার
আছে কিনা তা পরীক্ষা করে
দেখুন।

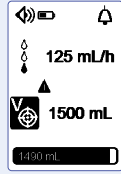


**নির্ধারিত পরিমাপের প্রায়
কাছাকাছি চলে আসার
বার্তা**

ফিডিং চালিয়ে যান বা শেষ
করুন।

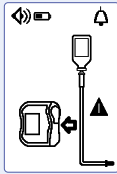


**ইনস্টলেশন সম্পর্কিত অ্যালার্ম
সেট করুন**

পাম্প মেকানিজমের উপরে ও নিচে
সেটের অবস্থান পরীক্ষা করুন
এবং এটিকে সঠিকভাবে লাগান।

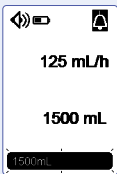

**নির্ধারিত পরিমাণ পূরণ হয়ে
যাওয়ার অ্যালার্ম**

ফিডিং শেষ করুন।

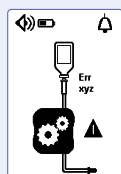

পাম্প ত্রুটির অ্যালার্ম

প্রযুক্তিগত ত্রুটির কোড (Err
xyz) নোট করুন এবং আপনার
বায়োমেডিক্যাল বিভাগে যোগাযোগ
করুন।

**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Amika®

এনটরোল নডিট্রিশন পাম্প
ছব্বিকৃত রফোরন্স গাইড



“যে কোনো অনুসন্ধান বা তথ্যের জন্য হোমকেয়ার এ ফোন করুন
২৪ ঘন্টা ফ্রীফোন হেল্পলাইন নম্বর 0808 100 1990”

**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Limited,
Cestrian Court, Eastgate Way,
Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1NT
ফোন: 01928 533533 ফ্যাক্স: 01928 533520
ইমেইল: scientificaffairsUK@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/gb
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত © 2018 EN01046

Amika® হলো Fresenius Kabi AG এর স্টেজিওগ্রাফিক ব্র্যান্ড।
Fresenius Kabi Ltd হলো © Fresenius Kabi Ltd এর নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকারী

01



গভিৎ সটেরে পত্রিচ কলযাম্প বনধ করুন এবং তারপর ইজবিয়াগ বা কনটইনারেরে সাথে সংযুক্ত করুন।

02



পাম্পেরে দরজা খুলুন।

03



নচিরে দকি নরিদশেকারী তীরচহিনেরে দকিএ একই লাইনএ গভিৎ সটেরে পত্রিচ কলযাম্প স্থাপন করুন যতক্ষণ না এটি জায়গামত বসে “ক্লকি” শব্দ করে।

04



গভিৎ সটেরে টাউবটি সরাসরি টাউব গাইডরে ভতেরে পূর্ববশে করান।

05



দরজাটি বনধ করুন, ঠকিমতে। আটকানোর জন্য লভিয়ারটি জায়গা মতে। নচিরে দকিএ ঠলেে দনি।

06



Amika® পাম্পটি চালু করুন – টপিন চালু/বনধ করার বে।তাম।

07



স্বয়ংকরয়ি পূরাইমিং কী-এ টপিন, এবং তারপর স্টার্ট বে।তামটি টপিন।

08



পূরাইমিং শেষে হলে, আবার স্টার্ট বে।তাম টপিন।

09



পূরতযাশতি ভলডিম না আসা পর্যন্ত +/- কী-এ চাপ দতিে থাকার মাধ্যমে টারগটে ভলডিম সটে করুন।

10



পূরতযাশতি ভলডিম না আসা পর্যন্ত, +/- কী-এ চাপ দতিে থাকার মাধ্যমে টারগটে ভলডিম সটে করুন।

11



ফডিং শুরু করার জন্য স্টার্ট বে।তামটি টপিন ফডিং শুরু করুন।

12



যে কে।নে। সময়ে ফডিং বনধ করার জন্য স্টপ কী-এ টপিন। ফডিং শেষে হলে বা আপনার কাঙ্খতি মাত্রায় পইঁছালে, স্টপ করার কী-এ টপিন।

13



টারগটে ভলডিমে পইঁছানোর পর যদি আপনার পরে।গরসে বার রসিটে করার পর্যয়।জন হয়, তাহলে স্টপ কী 2-3 সকেনেডরে জন্য টপিন।

14



পাম্প বনধ করার জন্য কাউন্টাউন সম্পূরণ না হওয়া পর্যন্ত চালু/বনধরে বে।তাম টপিন।

