

# Amika®

پمپ تغذیه انترال  
راهنمای تصویری




## چه کار کنم اگر ...

### اگر آلارم به صدا درآید:

آلارم را بی صدا کنید (در صورت لزوم)

مشکل را شناسایی کنید و اقدام مناسب را انجام دهید


آلارم را آزاد کنید تغذیه را از سر بگیرید

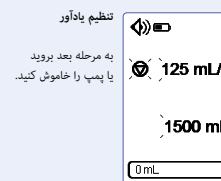

تنظیم یادآور  
به مرحله بعد بروید  
یا پمپ را خاموش کنید.




باتری را تخلیه کنید  
پمپ را بلافاصله به منبع اصلی  
وصل کنید.

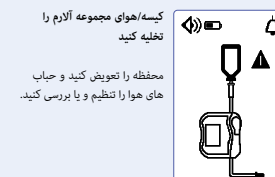

کیسه/هواي مجموعه آلارم را  
تخلیه کنید  
محفظه را تعویض کنید و حباب  
های هوا را تنظیم و یا بررسی کنید.



آلارم انسداد از پایین  
بررسی کنید که مجموعه پمپ/لوله  
تغذیه پس از پمپ در سمت بیمار  
مسدود نباشد.

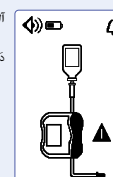


آلارم باز بودن در  
در پمپ را ببندید.



آلارم انسداد از بالا  
از عدم وجود انسداد در قسمت  
بین پمپ و محفظه مجموعه پمپ  
اطمینان حاصل کنید.



پیغام مربوط به رسیدن تقریبی  
به حجم موردنظر  
تغذیه را ادامه دهید یا آن را قطع  
کنید.

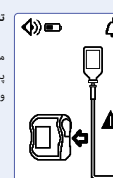

تنظیم آلارم نصب  
محل تنظیم در بالا و پایین مجموعه  
پمپ را بررسی کنید  
و آن را به صورت صحیح قرار دهید.



آلارم دریافت حجم موردنظر  
تغذیه را خاتمه دهید.



آلارم بروز خطا در پمپ  
کد خطای فنی (Err xyz) موردنظر  
را یادداشت کنید و با مسئول بخش  
بیومدیکال تماس بگیرید.

تماس بگیرید 0808 100 1990 (HOMECARE) در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات  
یا جهت دریافت پاسخ پرسش های خود با تلفن راهنمای 24 ساعته رایگان

01




گیره قیدی روی گیره تغذیه را ببندید و سپس آن را به EasyBag یا محفظه متصل کنید.

02



دَر پمپ را باز کنید.

03

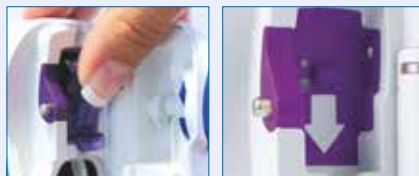

گیره تغذیه قیدی را در راستای پیکان رو به پایین قرار دهید تا "به درستی" در جای خود قرار بگیرد.

04



لوله گیره تغذیه را به صورت صاف در راهنمای لوله قرار دهید.

05



دَر را ببندید، دسته آن را به پایین فشار دهید تا کاملا در جای خود قفل شود.

06



پمپ Amika® را روشن کنید - با فشار دادن دکمه روشن/خاموش.

07



کلید مکش مایع به صورت خودکار را فشار داده، و سپس دکمه شروع را فشار دهید.

08



پس از اتمام مکش مایع، دکمه شروع را مجدداً فشار دهید.

09



با فشردن کلیدهای +/- سرعت جریان موردنظر را تنظیم کنید تا به میزان موردنظر برسد.

10



با فشردن کلیدهای +/- میزان حجم را به دلخواه خود تنظیم کنید تا به حجم موردنظر برسد.

11



کلید شروع را فشار دهید تا فرآیند تغذیه آغاز شود.

12



برای متوقف نمودن تغذیه در هر زمان از فرآیند تغذیه، کلید توقف را فشار دهید. پس از اتمام فرآیند تغذیه یا زمانی که حجم موردنظر تامین شده است، کلید توقف را فشار دهید.

13



جهت بازنشانی نشانگر پیشرفت پس از تامین حجم موردنظر، کلید توقف را به مدت 2-3 ثانیه فشار دهید.

14



برای خاموش کردن پمپ، دکمه روشن/خاموش را تا اتمام شمارش معکوس فشار دهید.

