




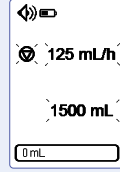
શું કરવું જો...

જો અલાર્મ વાગે તો:

 અલાર્મ મ્યૂટ કરો (જો જરૂરી હોય તો)

કારણ શોધો અને યોગ્ય પગલાં પર આગળ વધો

 અલાર્મ છોડો  ફીડિંગ/ખોરાક આપવાનું ફરી શરૂ કરો




રિમાઇન્ડર શરૂ કરો
હવે પછીના પગલા પર જાઓ અથવા પમ્પને સ્વીચ ઓફ કરો.




બેટરી ખાલી

પમ્પને તાત્કાલિકપણે મેઇનસ સપ્લાય સાથે જોડો.

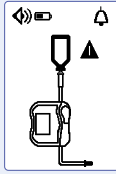


સેટ અલાર્મમાં ખાલી બેગ/ હવા

કન્ટેનર અને સેટ બદલો અથવા હવાના પર પોટા તો નથી તે તપાસો.

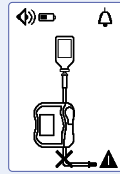


નીચે તરફના પ્રવાહમાં અવરોધનું અલાર્મ

પમ્પ બાદ, દર્દીની બાજુએ પમ્પ સેટ / ફીડિંગ ટ્યુબ સાફ છે કે નહિ તે તપાસો.

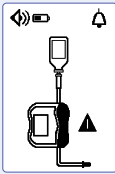


ડોર ખુલવાનું અલાર્મ

પમ્પ ડોર બંધ કરો.

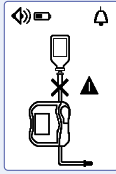


ઉપર તરફના પ્રવાહમાં અવરોધનું અલાર્મ

કન્ટેનર અને પમ્પની વચ્ચેનો પમ્પ સેટ સાફ છે કે નહિ તે તપાસો.

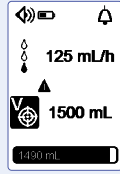


લક્ષ્યાંકિત જથ્થો લગભગ સંદેશ સુધી પહોંચ્યો

ફીડિંગ/ખોરાક આપવાનું ચાલુ રાખો અથવા ફીડિંગ/ખોરાક આપવાનું બંધ કરો.

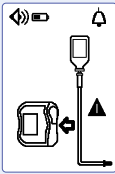


ઇન્સ્ટોલેશન અલાર્મ સેટ કરો

પમ્પ મિકેનિઝમની ઉપર અને નીચેની સેટની સ્થિતિ તપાસો અને તેને યોગ્ય રીતે દાખલ કરો.

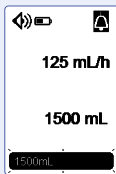

લક્ષ્યાંકિત જથ્થો અલાર્મ સુધી પહોંચ્યો

ફીડિંગ/ખોરાક આપવાનું બંધ કરો.

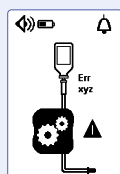

પમ્પમાં ખામીનું અલાર્મ

ટેકનિકલ ખામીનો કોડ (Err xyz) ની નોંધ કરો અને તમારા બાયોમેડિકલ વિભાગને સંપર્ક કરો.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Amika®

એન્ટેરલ ન્યૂટ્રિશન પમ્પ
સચિત્ર સંદર્ભ માર્ગદર્શિકા



કોઈપણ પૂછપરછ અથવા માહિતી માટે હોમકેરની 24 કલાક નિ:શુલ્ક ફોન હેલ્પલાઇન નંબર 0808 100 1990 પર ફોન કરો



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Limited,
Cestrian Court, Eastgate Way,
Manor Park, Runcorn,
Cheshire WA7 1NT
ટેલિફોન: 01928 533533 ફેક્સ: 01928 533520
ઇમેઇલ: scientificaffairsUK@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/gb
તૈયાર કર્યાની તારીખ: માર્ચ 2018 EN01046

Amika® એ Fresenius Kabi AGનો રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક છે.
Fresenius Kabi Ltd એ અધિકૃત વપરાશકર્તા છે © Fresenius
Kabi Ltd.

01



ગીવીંગ સેટ પર પિન્ય કલેમ્પનો બંધ કરો અને પછી ઇન્જીબેંગ અથવા કન્ટેનર સાથે જોડો.

02



પમ્પ ડોર ખોલો.

03



તે તેના સ્થાને "ક્લિક" ન થાય ત્યાં સુધી ગીવીંગ સેટના પિન્ય કલેમ્પને નીચેની તરફના તીરની સીધમાં પકડી રાખો.

04



ગીવીંગ સેટની ટ્યુબને ટ્યુબ ગાઇડની અંદર સીધી મૂકો.

05



ડોર બંધ કરો. તેને તેના સ્થાન પર ચુસ્તપણે બંધ કરવા માટે લીવરને નીચેની તરફ દબાવો.

06



ઓન/ઓફ બટન દબાવીને – Amika® પમ્પ ચાલુ કરો.

07



ઓટોમેટિક પ્રાઇમિંગ કી દબાવો અને પછી સ્ટાર્ટ બટન દબાવો.

08



જ્યારે પ્રાઇમિંગ પૂરું થાય ત્યારે ફરીથી સ્ટાર્ટ બટન દબાવો.

09



ઇચ્છિત જથ્થા સુધી પહોંચે નહીં ત્યાં સુધી +/- કીઝ દબાવીને જરૂરી પ્રવાહનો દર સેટ કરો.

10



ઇચ્છિત જથ્થા સુધી પહોંચે નહીં ત્યાં સુધી +/- કીઝ દબાવીને લક્ષ્યાંકિત જથ્થો સેટ કરો.

11



ફીડિંગ/ખોરાક આપવાનું શરૂ કરવા માટે સ્ટાર્ટ કી દબાવો.

12



કોઈપણ તબક્કે ફીડિંગ/ખોરાક આપવાનું બંધ કરવા માટે, સ્ટોપ કી દબાવો. જ્યારે ફીડિંગ/ખોરાક આપવાનું પૂર્ણ થાય અથવા તમારા લક્ષ્યાંકિત જથ્થા સુધી પહોંચી જાઓ, ત્યારે સ્ટોપ કી દબાવો.

13



લક્ષ્યાંકિત જથ્થા સુધી પહોંચી ગયા બાદ જો તમારે પ્રોગ્રેસ બાર રિસેટ કરવાની જરૂર હોય તો સ્ટોપ કી 2-3 સેકન્ડ માટે દબાવો.

14



પમ્પ બંધ કરવા માટે ઊંધી ગણતરી પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી ઓન/ઓફ બટન દબાવો.

