


ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ...

ਜੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ:

ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ)


ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ

ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ ਫੀਡਿੰਗ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

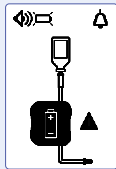


ਖਾਲੀ ਬੈਟਰੀ

ਪੰਪ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਖ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ।

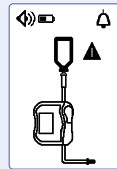


ਖਾਲੀ ਬੈਗ/ਸੈੱਟ ਅਲਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ

ਕੰਟੇਨਰ ਬਦਲੋ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

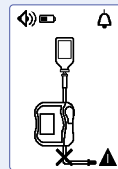


ਵੱਲ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਅਲਾਰਮ

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਪ ਸੈੱਟ / ਮਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

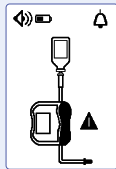

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਲਾਰਮ

ਪੰਪ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।

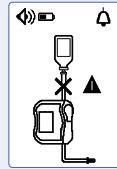


ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਅਲਾਰਮ

ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।




ਟੀਚਾਬੱਧ ਆਇਤਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਫੀਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਖੋ ਜਾਂ ਫੀਡਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰੋ।

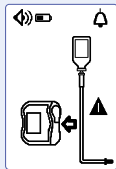


ਸਥਾਪਤੀ (ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ) ਅਲਾਰਮ ਸੈੱਟ ਕਰੋ

ਪੰਪ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸੈੱਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਓ।

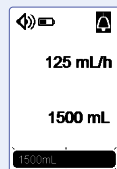


ਟੀਚਾਬੱਧ ਆਇਤਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਲਾਰਮ

ਫੀਡਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰੋ।

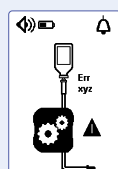

ਪੰਪ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਦਾ ਅਲਾਰਮ

ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕੋਡ (Err xyz) ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਯੋਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

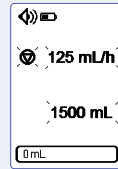

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦਦਾਰਨੀ

ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਵਧੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।



FRESENIUS KABI

caring for life

Amika®

ਐਂਟਰਾਲ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਪੰਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵਾਲਾ ਗਾਈਡ



ਭੀਓਪਾੜ ਪ੍ਰਭੂਪਰਭ ਅਥਵਾ ਮਾਛਿੱਤੀ ਮਾਟੇ ਛੀਮ ਡੇਰ ਪਰ ਡੀਓ ਡਰੀ
24 ਡਕਾਡ ਮਫ਼ਤ ਫ਼ੀਨ ਛੇਲ੍ਹਪਕਾਏਨ ਨੰਘਰ 0808 100 1990

01



ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਕੰਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ EasyBag ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ।

02



ਪੰਪ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।

03



ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਕੰਜੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਰਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿਚ "ਕਲਿਕ" ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

04



ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਿਊਬ ਗਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ।

05



ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੀਵਰ (ਚਾਬੀ) ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕੋ।

06



Amika® ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਪ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।

07



ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਾਈਮਿੰਗ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ (ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ) ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।

08



ਪ੍ਰਾਈਮਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਓ।

09



ਉਦੋਂ ਤੱਕ +/- ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਬਾ ਕੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਆਇਤਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਚਾਹਿਆ ਆਇਤਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ।

10



ਉਦੋਂ ਤੱਕ +/- ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਬਾ ਕੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਆਇਤਨ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨਚਾਹਿਆ ਆਇਤਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ।

11



ਫੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ।

12



ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੀਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟੋਪ (ਬੰਦ ਕਰੋ) ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ। ਖੁਰਾਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾਬੱਧ ਆਇਤਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਸਟੋਪ (ਬੰਦ ਕਰੋ) ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ।

13



ਜੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਆਇਤਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਬਾਰ (ਤਰੱਕੀ ਪੱਟੀ) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 2-3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਟਾਪ ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ।

14



ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਬਟਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਬਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

