

## Amika®

ٹیوب کے ذریعے غذائیت دینے والا پمپ  
تصویری حوالوں کے ساتھ رہنمائی



### کیا کرنا چاہئے اگر۔۔۔

#### اگر الارم بجے:


الارم خاموش کریں (بشرط ضروری)

سبب کا پتہ لگائیں اور موزوں عمل کی طرف بڑھیں

الارم جاری کریں فیڈنگ جاری رکھیں


یاد دہانی کا آغاز

اگلے قدم کی طرف بڑھیں  
یا پمپ بند کر دیں

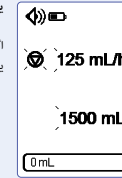


انجذاب گیس کے الارم کو نیچے  
کریں

پمپ کرنے والے آلہ کا جائزہ لیں  
/ پمپ کے بعد خوراک فراہم کرنے  
والی ٹیوب صاف ہے، مریض کی  
طرف

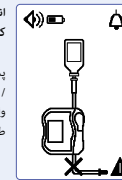


مقررہ الارم میں بیگ/بوا کو خالی  
کریں۔

کثرتاً بدلیں اور بوا کے باہر  
چیک کریں۔

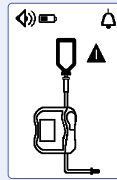


خالی بیٹری

پمپ فی الفور مرکزی سپلائی سے  
منسلک کریں۔

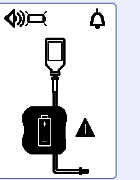


مطلوبہ ہدف تقریباً حاصل ہونے  
کا پیغام۔

کھانا جاری رکھیں یا ختم کریں۔

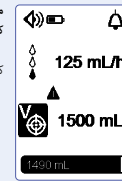


انجذاب گیس کا الارم اوپر کریں۔

دیکھیں کہ کثرتاً اور پمپ کے  
درمیان پمپ سیٹ صاف ہے۔

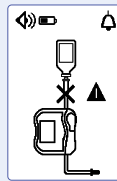


دروازہ کھلنے کا الارم

پمپ کا دروازہ بند کریں۔

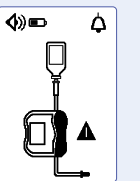


پمپ میں ایرر کا الارم

تکنیکی خرابی کوڈ (Err xyz) کو  
نوٹ کریں اور اپنے حیاتیاتی شعبہ  
سے رابطہ کریں

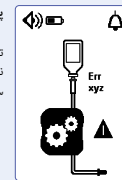


مطلوبہ ہدف حاصل ہونے کا الارم

کھانا ختم کریں۔

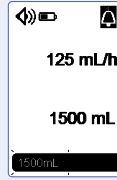

تصییب الارم مقرر کریں۔

پمپ کی پڑاگاری کے اوپر اور نیچے  
نصب کردہ حالت کی جانچ کریں اور  
صحیح طرح ڈالیں  
اور صحیح طریقے سے ڈالیں

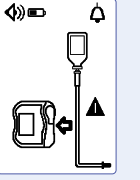

”کسی بھی تحقیقات یا معلومات کے لئے ہوم کثیر سے رابطہ کریں  
24 گھنٹے امداد ی مقاصد کے لئے مفت فون نمبر 0808 100 1990“

04



پتلا مادہ فراہم کرنے کے آلہ کی ٹیوب کو سیدھا ٹیوب گائیڈ کے اندر ڈالیں

03



پتلا مادہ فراہم کرنے کے آلات پر شکنجے کو نیچے کی طرف دہنے کے تیر کے نشان کے برابر لیتے جائیں جب تک وہ "کلک" کی آواز تک نا پہنچے

02



پمپ کا ڈھکن کھولیں

01



پتلا مادہ فراہم کرنے کے آلات پر شکنجے کو بند کریں اور پھر ایزی بیگ یا ڈبا اُس کے ساتھ لگائیں

09



+/- والے بٹن کو دباتے ہوئے مطلوبہ بہاؤ کی رفتار مقرر کریں ، جب تک مطلوبہ مقدار تک پہنچ نہیں جاتے

08



جب حل ہونا مکمل ہو جائے ، تب شروع والا بٹن دبائیں

07



خودکار طریقے سے حل کرنے والے بٹن کو دبائیں ، اور پھر شروع کرنے والا بٹن دبائیں

06



آمیکا پمپ کو چلا دیں - چلانا / بند بٹن کو دباتے ہوئے

05



ڈھکن بند کر دیں ، لیور کو نیچے کی طرف دبائیں مضبوطی سے بند کرنے کے لئے

14



پمپ کو بند کرنے کے لئے چلانے / بند کرنے والے بٹن کو دبائے رکھیں جب تک آئی گنتی چلنا مکمل نہ ہو جائے

13



مطلوبہ مقدار پر پہنچنے کے بعد اگر آپ نے پیش رفت دیکھنے والی لائین کو دوبارہ ترتیب دینا ہو تو روکنے والے بٹن کو 2-3 سیکنڈ کے لئے دبائیں -

12



کسی بھی مرحلے پر فیڈنگ روکنے کے لیے سٹاپ کا بٹن دبائیں۔ کسی بھی وقت خوراک کو روکنے کے لئے ، روکنے والے بٹن کو دبائیں

11



فیڈنگ کا عمل شروع کرنے خوراک شروع کرنے کے لئے چلانے والے بٹن کو دبائیں

10



+/- والے بٹن کو دباتے ہوئے مطلوبہ مقدار مقرر کریں ، جب تک مطلوبہ مقدار تک پہنچ نہیں جاتے