




**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

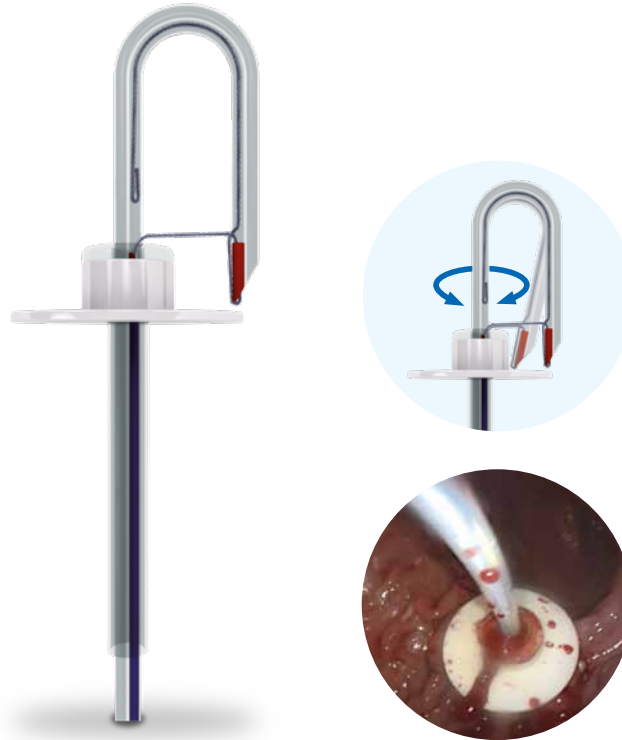

# Flamingo

Hergestellt von FUJIFILM medwork GmbH  
Vertrieb durch FUJIFILM Deutschland

Inspiziert von der Natur, extrem beweglich und effektiv:  
Das Flamingo-Set, die Antwort auf die therapeutischen  
Herausforderungen des Buried-Bumper-Syndroms.

Einfaches und präzises Freischneiden der inneren  
Halteplatte der PEG-Ernährungssonde dank des  
einzigartigen Schneidedraht-Designs, das eine mehr-  
dimensionale Schnittführung ermöglicht.

Mitentwickelt durch Prof. Dr. med. A. Dormann

Mehrdimensionale Schnittführung  
für präzises Freischneiden der inneren  
Halteplatte

Präzise Steuerbarkeit erleichtert die  
sternförmige Inzision der Mukosa

# Flamingo

Hergestellt von FUJIFILM medwork GmbH | Vertrieb durch FUJIFILM Deutschland



## Endoscopy

„A novel device for the endoscopic management of buried bumper syndrome“  
<https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/a-0833-8516>

## Wissenswertes

<b>Fallzahl:</b>	5 Patienten mit einem Buried Bumper (n=4 komplett eingewachsen, n=1 fast komplett eingewachsen)
<b>Intervention:</b>	Entfernung des Buried Bumper mit dem Flamingo-Set
<b>Ergebnisse:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alle Buried Bumper konnten sicher und schnell entfernt werden</li><li>• Durchschnittliche Behandlungsdauer ~ 9 min</li><li>• Die Nachsorge war unkompliziert und die enterale Ernährung konnte nur wenige Stunden nach der Behandlung wieder problemlos aufgenommen werden.</li><li>• Der Flamingo war einfach zu handhaben, sicher in der Anwendung und äußert effektiv im Hinblick auf die Dauer der Interventionszeit im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.</li></ul>

## Fazit

Laut den Autoren<sup>1</sup> hat das Flamingo-Set das Potenzial dazu, künftig als Standard für die Behandlung von komplett eingewachsenen Buried Bumpers eingesetzt zu werden.



„Das FLAMINGO-Set wurde in einzigartiger Weise für die besonders schwierigen Umstände der Buried Bumper-Therapie entwickelt. Ich verwende es, weil ich damit gegenüber anderen Techniken an Sicherheit gewinne und gleichzeitig die Untersuchungszeit deutlich reduzieren kann.“

Co-Inventor Prof. Dr. med. Arno Dormann 08.02.2022

## Bestellinformationen

Artikel	VE*	Art.-Nr.	Merkmale	Länge	Schnittlänge	Für FD
Flamingo-Set	1 x 1	POL3-P1-40-30-30	Flamingo für 15 CH PEG Ernährungssonde (2 Lumen, drehbar, OL-Stromanschluss), Fremdkörperzange und Führungsdraht	30 cm	6/10 mm	.035"

\*Verpackungseinheit

## Bestellung - Lieferung - Vertrieb - Verantwortung nur durch:

FUJIFILM Deutschland | Niederlassung der FUJIFILM Europe GmbH | Balcke-Dürr-Allee 6 | 40882 Ratingen |  
Tel: +49 (0)2102 5364 9103 | [customersupport-dx\\_feg@fujifilm.com](mailto:customersupport-dx_feg@fujifilm.com) | [www.fujifilm-endoscopy.com](http://www.fujifilm-endoscopy.com)

<sup>1</sup>Pieter Hindrycks (Universitair Ziekenhuis Gent, Gent, Belgien) | Barbara Dhooghe (Algemeen Ziekenhuis West, Veurne, Belgien) |  
Andreas Wannhoff (Kliniken Ludwigsburg, Ludwigsburg, Deutschland)



**FRESENIUS  
KABI**  
caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH  
Kundenberatung  
61346 Bad Homburg  
T 0800 / 788 7070  
F 06172 / 686 8239  
[kundenberatung@fresenius-kabi.de](mailto:kundenberatung@fresenius-kabi.de)  
[www.fresenius-kabi.de](http://www.fresenius-kabi.de)

wir helfen Menschen