

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器  
管理医療機器 単回使用骨髓採取・移送セット 33984002

再使用禁止

## ボーン マロウ コレクション キット

### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止


### 【形状・構造及び原理等】

本品は、骨髓液をろ過、収集するために用いる器具であり、次の構成部からなる。

#### セット内容

- |   |     |
|---|-----|
| 1. コレクションコンテナ（骨髓採取用バッグ）<br>（容量 1200mL、850 $\mu$ m のフィルター付き） | 1 枚 |
| 2. 500 $\mu$ m フィルター（赤キャップ）                                 | 2 個 |
| 3. 200 $\mu$ m フィルター（青キャップ）                                 | 1 個 |
| 4. トランスファーパックコンテナ（容量 600mL）                                 | 3 枚 |
| 5. トランスファーパックコンテナ（容量 2000mL）                                | 1 枚 |
| 6. チッププロテクター（青色のキャップ/通気口なし）                                 | 4 個 |
| 7. 無菌ラップ（製品を包んである覆布）  | 2 枚 |

※コレクションコンテナ、トランスファーパックコンテナは Y 字管の違いにより 2 種類ある。

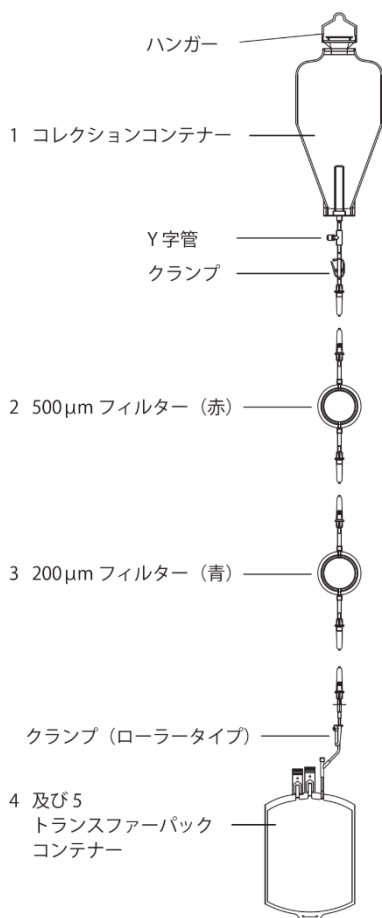

- ・ 図は代表的な構成であり、上記構成と仕様が異なる場合があります。
- ・ 本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル））を使用しています。
- ・ コレクションコンテナの目盛りは、おおよその値です。目安として使用して下さい。

### 【使用目的又は効果】

本品は骨髓移植のための骨髓液のろ過、収集を行うために使用する器具である。

### 【使用方法等】

本品は、滅菌済みのディスポーザブル製品であり、一回限りの使用で使い捨て、再使用しないでください。

1. コレクションコンテナキャップを開け、コレクションコンテナに抗凝固液を入れる。
2. 骨髓液を注入し、軽くコレクションコンテナを絞り、抗凝固液とよく混和する。
3. コレクションコンテナキャップを閉める。
4. ボーンマロウコレクションキットにあるフィルターを、上から 500 $\mu$ m（赤）、200 $\mu$ m（青）の順に小さくなるように接続する。
5. トランスファーパックコンテナを、一番下のフィルター（200 $\mu$ m のフィルター）に接続する。
6. コレクションコンテナとトランスファーパックコンテナのクランプを開ける。
7. 重力により、骨髓液はフィルターを通り、トランスファーパックコンテナにろ過される。
8. 操作終了後のコレクションコンテナとトランスファーパックコンテナの両方のクランプを閉め、すみやかに 200 $\mu$ m フィルターの下方向の連結管 4 を鉗子等で締める。
9. トランスファーパックコンテナを、200 $\mu$ m フィルターより取りはずし、別包装されてあるコネクタキャップを、コネクタにはめる。

### 【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ トランスファーパックコンテナに収集した骨髓液を凍結しないで下さい。
- ・ 骨髓液の入ったコレクションコンテナはキャップやクランプが閉じていることを確認し、常に垂直な状態で取り扱って下さい。

### 【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・ 水濡れに注意し、室温で保管して下さい。
- ・ 直射日光及び高温多湿を避けて保管して下さい。
- ・ 医療従事者以外の方の手の触れない場所に保管して下さい。
- ・ 凍結させないで下さい。

<使用期限>

- ・ 外箱に表記した使用期限を必ず守って下さい。[自己認証（当社データ）により設定]

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>



フレゼニウスカービジャパン株式会社

\* <https://www.fresenius-kabi.com/jp/>

<製造業者>

Fenwal, Inc.（アメリカ合衆国）

<販売業者>

株式会社ジェイ・エム・エス

\*\* 電話番号：0120-923-107

別紙の使用説明書等を必ずご参照下さい