

ATO

REF. 9108431

ATO


REF 9108431

ATY

REF. 9108401

Instruções de Uso N3313051/6ptbr

Antes de utilizar o produto verifique se a versão desta Instrução de Uso corresponde à versão informada na embalagem do produto. Para obter as Instruções de Uso também em formato impresso, sem custo adicional, contatar o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do SAC 0800-707-3855 ou através do e-mail fresenius.br@fresenius-kabi.com

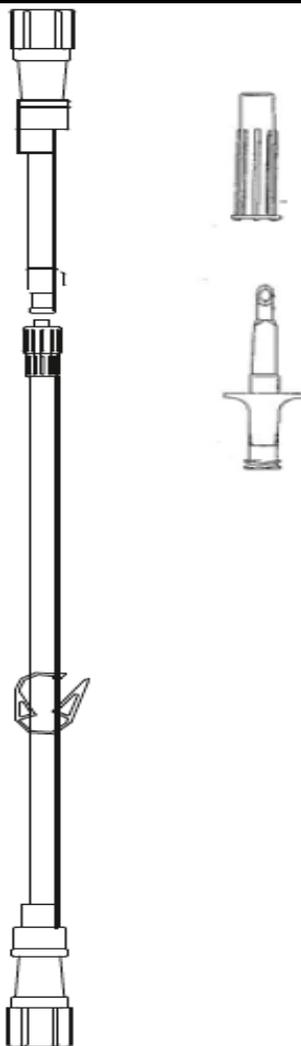

A explicação dos símbolos utilizados nos rótulos e nas embalagens é dada em folheto anexo (N3313451).

ATO Oxygenator-Line (ATO Linha de Oxigenador)

Acessórios opcionais:

Adaptador ATY Y

Adaptador: Spike x LL fêmea (incluído)

Descrição do dispositivo:

Sistema de tubos para conectar um oxigenador com um conector macho 1/4" ou um conector fêmea Luer lock ou via uma bolsa de transferência com port para um dispositivo de autotransusão:

- através de um adaptador Y conectado a um reservatório de autotransusão; ou
- diretamente no dispositivo de autotransusão que aceita um conector fêmea 1/4"; ou
- através de um reservatório de autotransusão.

Precauções e avisos:

1. Leia todas as instruções, avisos e precauções antes do uso.
2. O produto somente deve ser manuseado por pessoal treinado e qualificado.
3. Estéril (Óxido de etileno) e apirogênico. Utilizar somente se a embalagem e o produto não estiverem danificados. Não reesterilizar.
5. A reutilização de dispositivos de uso único cria um risco potencial de contaminação dos mesmos. Isto poderá originar infecções no paciente, dador ou utilizador e estas poderão levar a doença ou morte desse mesmo paciente, dador ou utilizador.
6. Atenção: A lei americana restringe a venda deste dispositivo somente profissionais médicos.
7. Utilizar técnicas assépticas durante todos os estágios de montagem e uso.
8. Assegurar que todas as conexões se encaixam perfeitamente.
9. Após o uso, esse produto pode conter material infeccioso. Destruir o produto de acordo com a regulamentação médica vigente.
10. Este produto contém DEHP (ftalato de 2-etilhexilo), um plastificante que se suspeita ser tóxico para a reprodução. Se possível, deve evitar-se o tratamento repetido ou prolongado com este ou outro produto que contenha DEHP por crianças, ou mulheres grávidas ou a amamentar. Os médicos devem avaliar as vantagens da utilização contra os riscos previsíveis

Instruções para uso:

Antes de preparar o circuito extracorpóreo, conecte linha do oxigenador na porta de perfusão coronária do oxigenador e feche o clamp com segurança.

Após a conclusão do circuito extracorpóreo:

Conecte uma das extremidades da linha do oxigenador a ramificação livre do adaptador Y ligado a saída do reservatório e um dispositivo de autotransusão e feche o clamp da linha de saída do reservatório. Abra os clamps na linha do oxigenador e processe o conteúdo do oxigenador ou:

Conecte qualquer uma das extremidades da linha do oxigenador diretamente a linha de entrada de sangue do dispositivo de autotransusão. Abra as pinças na linha do oxigenador e processe o conteúdo do oxigenador.

ou:

Conecte uma das extremidades da linha do oxigenador a um conector entrada de um reservatório de autotransusão de 1/4" e esvazie o conteúdo do oxigenador no reservatório antes do processamento



Fresenius Kabi AG
61346 Bad Homburg
Alemanha

Registrado e Distribuído no Brasil por:

Fresenius Hemocare Brasil Ltda.

Rua Roque Gonzáles, 128, Jd. Branca Flor,
06855-690, Itapeverica da Serra, Brasil
Registro ANVISA n. 10154450161
SAC 0800-707-3855