

# **ATR 40/120**

## **Autotransfusion Reservoir**

**ATR 40**  
REF. 9108411

**ATR 120**  
REF. 9108471

**ATH Holder**  
REF. M690991

**ATS**  
REF. 9108481

**ATY**  
REF. 9108401

Instruções de Uso **N3313011/9ptbr**

Antes de utilizar o produto verifique se a versão desta Instrução de Uso corresponde à versão informada na embalagem do produto. Para obter as Instruções de Uso também em formato impresso, sem custo adicional, contatar o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do SAC 0800-707-3855 ou através do e-mail [fresenius.br@fresenius-kabi.com](mailto:fresenius.br@fresenius-kabi.com)

A explicação dos símbolos utilizados nos rótulos e nas embalagens é dada em folheto anexo (N3313451).

**ATR 40 Reservatório para autotransusão**  
**ATR 120 Reservatório para autotransusão**  
**Alça ATH**

*Acessórios opcionais:*

ATS - Linha de sucção

ATY - Adaptador em Y

**Descrição do dispositivo:**

O ATR 40 e o ATR 120 da Fresenius são reservatórios de 3 litros com filtros de 40 ou 120 micras, respectivamente.

Volume mínimo de retenção: < 90 ml

Volume de início do filtro (pós-prime): < 10 ml

**Indicação para uso:**

Reservatório de autotransusão para coletar, filtrar e armazenar o sangue antes do processamento.

**Contraindicações:**

O uso de sangue deste equipamento para reinfusão pode ser contraindicado, por exemplo, nos casos de septicemia ou enfermidades tumorais.

A responsabilidade por seu uso cabe somente ao médico encarregado.

**Precauções e avisos:**

1. Leia todas as instruções, avisos e precauções antes do uso.
2. O produto somente deve ser manuseado por pessoal propriamente treinado e qualificado.
3. Estéril (Óxido de etileno) e apirogênico. Utilizar somente se a embalagem e o produto não estiverem danificados.
4. Indicado para utilização apenas uma vez num único paciente.
5. A reutilização de dispositivos de uso único cria um risco potencial de contaminação dos mesmos. Isto poderá originar infecções no paciente, dador ou utilizador e estas poderão levar a doença ou morte desse mesmo paciente, dador ou utilizador.
6. Utilizar técnicas assépticas durante todos os estágios de montagem e uso.
7. Assegurar que todas as conexões se encaixam perfeitamente.
8. Para evitar danos ao reservatório, assegurar que a válvula de escape da pressão (1) não esteja oclusa ou que uma das linhas de entrada esteja aberta para sucção de ar ou sangue.
9. Pressões de vácuo superiores a 100 mmHg podem resultar em alto índice de hemólise.
10. Evitar contato do reservatório com agentes halogenados a base de hidrocarbonetos.
11. O tempo de armazenamento seguro do sangue no reservatório é uma decisão médica e pode variar em cada caso (AABB Standards, 14th Edição 1991, Seção L 2.500 cita, "Se não for para transfusão, o sangue aspirado em condições intraoperatórias, pós-operatórias ou pós-traumáticas deve ser transfundido em 6 horas após o início da coleta").
12. Este dispositivo não é destinado para uso como reservatório cardiostômico.
13. Após o uso, esse produto pode conter material infeccioso. Destruir o produto de acordo com a regulamentação médica vigente.
14. Este produto contém DEHP (ftalato de 2-etilhexilo), um plastificante que se suspeita ser tóxico para a reprodução. Se possível, deve evitar-se o tratamento repetido ou prolongado com este ou outro produto que contenha DEHP por crianças, ou

mulheres grávidas ou a amamentar. Os médicos devem avaliar as vantagens da utilização contra os riscos previsíveis.

**Instruções para uso**


**Montagem de reservatório único:**

1. Fixar firmemente a alça ATH (2) a um polo capaz de suportar o peso da alça e do reservatório.
2. Remover o reservatório (3) de sua embalagem e fixá-lo à alça.
3. Fechar o clamp (4) na linha de saída do reservatório (5)
4. Conectar a linha de vácuo ao conector 1/4" de tampa amarela (6).
5. Ligar o conector de entrada da linha de sucção ao conector 1/4" de tampa azul apropriado (7).
6. Ligar o vácuo e ajustá-lo para 100 mmHg ou menos.
7. Realizar o prime do reservatório aspirando 100-200 ml de anticoagulante.
8. Ajustar o fluxo do anticoagulante para manter a anticoagulação adequada durante a coleta de sangue.
9. Conectar o equipamento de autotransusão à linha de saída do reservatório (5) e abrir o clamp (4). Processar o sangue de acordo com as instruções do fabricante.

**Nota:** O sangue e os fluidos devem ser introduzidos no reservatórios pelo luer lock (8) ou pelo conector 3/8" de entrada (9).

**Montagem do reservatório duplo:**

1. Montar dois reservatórios com duas linhas de sucção.
2. Conectar as fontes de vácuo aos reservatórios separadamente.
3. Conectar o adaptador em Y com as linhas de saída de ambos os reservatórios e ao equipamento de autotransusão. Controlar a direção do fluxo pela posição do clamp no adaptador em Y.

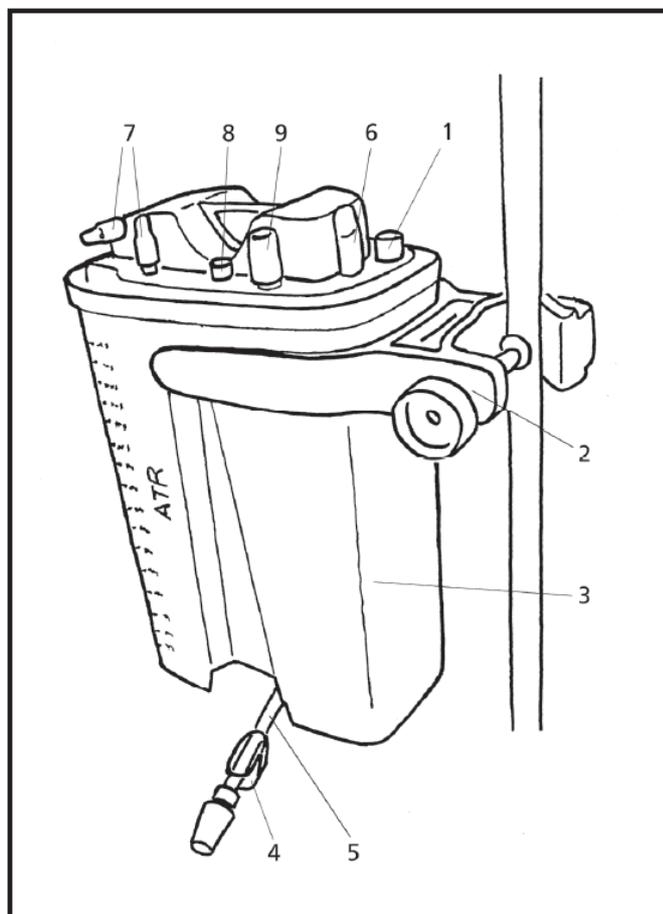



Fresenius Kabi AG  
61346 Bad Homburg  
Alemanha

Registrado e Distribuído no Brasil por:

**Fresenius Hemocare Brasil Ltda.**

Rua Roque Gonzáles, 128, Jd. Branca Flor,  
06855-690, Itapecerica da Serra, Brasil

Registro ANVISA n. 10154450161

SAC 0800-707-3855