

# EQUIPO PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS OP MS PARA BOMBA DE INFUSÃO

REF Z072990FSA

## INSTRUÇÕES DE USO


**ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO (IFU) TAMBÉM EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR ATRAVÉS DO SAC 0800-707-3855 OU ATRAVÉS DO E-MAIL FRESSENIUS.BR@FRESSENIUS-KABI.COM**

### MONTAR O SISTEMA

- O equipo para infusão de medicamentos fotosensíveis OP MS para bomba de infusão deverá estar em condições de temperatura ambiente: 18°/30°C.
- Prepare o recipiente de solução (bolsa/ frasco) com a linha de infusão correspondente, em conformidade com os procedimentos de infusão padrão.


### PREENCHIMENTO DO EQUIPO PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS OP MS PARA BOMBA DE INFUSÃO USANDO UMA BOLSA

- Introduza a ponta completamente dentro da bolsa (pinça rolete com corta fluxo – entrada de ar fechada).
- Pressione a bolsa para a retirada do ar, e encha a câmara de gotejamento até 1/2 a 2/3 de sua capacidade.
- Pendure a bolsa em posição invertida e deixe o líquido fluir para o equipo.
- Quando o equipo estiver totalmente preenchido, feche a pinça e verifique a ausência de bolhas de ar.

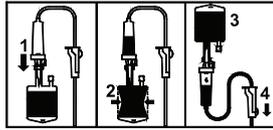

### PREENCHIMENTO DO EQUIPO PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS OP MS PARA BOMBA DE INFUSÃO USANDO UM FRASCO

- Introduza a ponta completamente dentro do frasco (pinça rolete com corta fluxo – entrada de ar fechada).
- Feche a pinça rolete com corta fluxo.
- Pendure o frasco em posição invertida e pressione a câmara de gotejamento para o enchimento até ~ 1/2 de sua capacidade.
- Abra a pinça rolete com corta fluxo.
- Abra a entrada de ar, e deixe o líquido fluir para o equipo.
- Quando o equipo estiver totalmente preenchido, feche a pinça de controle de fluxo e verifique a ausência de bolhas de ar.

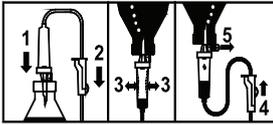

### ACIONAMENTO DA OPTIMA E INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE INFUSÃO:

Abra a porta da Bomba Optima MS levantando a alça da porta. A bomba é ligada automaticamente quando conectada à rede elétrica (se configurada).

Se não, acionar.

O auto-teste verifica a funcionalidade da bomba. Certifique que todos os LEDs e alertas sonoros estão ativados.


Verifique se o tipo de equipo mostrado é do mesmo tipo que você está inserindo

- Insira a pinça de segurança em seu furo como indicado no desenho:
- Insira o tubo na guia da esquerda do equipo de maneira que o equipo fique apoiado, na posição alinhada na membrana da bomba.
- Insira o tubo na guia direita do equipo.
- Insira o tubo no detector de ar, formando um circuito.
- Feche a porta empurrando sua alça



O Sistema de Verificação de Oclusão (OCS) fecha automaticamente a linha, ativa o bombeamento real, verifica o aumento de pressão. Portanto, o teste OCS verifica o bom posicionamento do equipo e a oclusão da bomba, evitando assim o risco de fluxo livre da bomba.

Coloque o recipiente fora da Orchestra Infusion Workstation

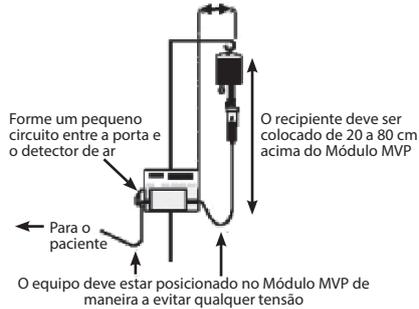

### USO DO EQUIPO PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS OP MS PARA BOMBA DE INFUSÃO POR GRAVIDADE APÓS A REMOÇÃO DA BOMBA:

A pinça de segurança pode ser liberada como abaixo indicado:

- Com dois dedos, pressione os dois clips laterais de maneira a liberar um lado da pinça.
- Com um dedo, levante a borda da pinça que permaneceu fechada.



### ACIONAMENTO DO MÓDULO MVP MS E INSTALAÇÃO DO EQUIPO PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS OP MS PARA BOMBA DE INFUSÃO


Abra a porta do Módulo MVP levantando a alça da porta. A bomba é ligada automaticamente quando conectada à rede elétrica.

Se não, acionar.

O auto-teste verifica a funcionalidade da bomba. Certificar-se que todos os LEDs e alertas sonoros

estão ativados. Verifique se o tipo de equipo mostrado é do mesmo tipo que você está inserindo.


- Insira a pinça de segurança em seu furo como indicado no desenho:
- Insira o tubo na guia esquerda do equipo de maneira que o tubo fique apoiado, na posição alinhada na membrana da bomba.
- Insira o tubo na guia direita do equipo.
- Insira o tubo no detector de ar, formando um circuito.
- Feche a porta empurrando sua alça

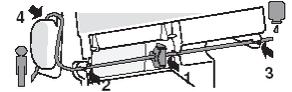

O Sistema de Verificação de Oclusão fecha automaticamente a linha, ativa o bombeamento real, verifica o aumento de pressão. Portanto, o teste OCS verifica o bom posicionamento do equipo e a oclusão da bomba, evitando assim o risco de fluxo livre da bomba.

### USO DO EQUIPO PARA INFUSÃO DE MEDICAMENTOS FOTOSSENSÍVEIS OP MS PARA BOMBA

Coloque o recipiente fora da Orchestra Infusion Workstation

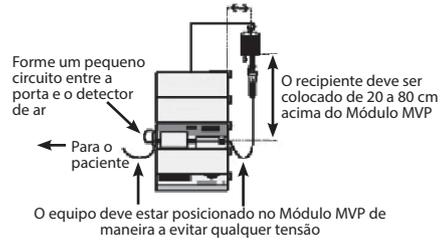

### DE INFUSÃO POR GRAVIDADE APÓS A REMOÇÃO DA BOMBA:

A pinça de segurança pode ser liberada como abaixo indicado:

- Com dois dedos, pressione os dois clips laterais de maneira a liberar um lado da pinça.
- Com um dedo, levante a borda da pinça que permaneceu fechada.



### PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO, BEM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Produto médico de uso único.
- Não utilizar após a data de validade
- Este dispositivo é estéril. Proibido re-processar. Destruir após o uso.
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou danificada
- Manter em temperatura ambiente e em local protegido da umidade
- Produto não deve ser usado com infusão de medicamentos incompatíveis com PVC e com hemoderivados.

### INDICAÇÕES:

- Infusão de quaisquer medicamentos/fluidos, incluindo medicamentos sensíveis à luz (incluindo medicamentos sensíveis ao UV).
- Infusão de medicamentos sem exigências específicas de filtração.

### CONTRAINDICAÇÕES:

- Com infusão de medicamentos incompatíveis com PVC (ex., nitroglicerina, dinitrato de isossorbida, paclitaxel).
- Com hemoderivados.

Produto esterilizado a Gás Oxido de Etileno  
Registro ANVISA nº. 80145110161

### EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS RÓTULOS E EMBALAGEM DO PRODUTO

- Consultar instruções de uso
- Produto de uso único
- 20 gotas de água destilada equivalem a um volume de 1 mL +/- 0,1 mL
- Manter longe da luz solar
- Manter seco
- Apirogênico

Não usar o produto ou seu conteúdo caso aparente algum sinal de deterioração.

**STERILE EO** Esterilizado por Óxido de Etileno

**P** Para utilização por pressão

**PHT/DEHP** Contém/presença de ftalatos: dietil hexil ftalato (DEHP)

**VOL** Capacidade de armazenamento de uma sonda de 1 m.

### IMPORTADO/DISTRIBUÍDO POR:

Fresenius Kabi Brasil Ltda.  
Av. Marginal Projetada, 1652 - Barueri / SP

SAC: 0800 707 3855  
C.N.P.J. 49.324.221/0001-04

RESPONSÁVEL TÉCNICA:  
Cintia M. P. Garcia CRF SP – 34871

**FRESSENIUS KABI**  
caring for life

Fresenius Kabi AG  
61346 Bad Homburg  
Germany  
Tel.: +49(0)6172/686-0  
www.fresenius-kabi.com



FABRICANTE:  
Fresenius Kabi AG  
D-61346, Bad Homburg  
Alemanha