
EXTENSORES PRONEO



BR7752006 / 7752006 - Extensor ProNeo ENFit, 30 cm
BR7752005 / 7752005 - Extensor ProNeo ENFit, 120 cm

VERSÃO DE INSTRUÇÃO DE USO: BR775200/V00

REVISADO EM: 05/05/2021

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO

PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO (IFU) TAMBÉM EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR ATRAVÉS DO SAC 0800-707-3855 OU ATRAVÉS DO E-MAIL FRESENIUS.BR@FRESENIUS-KABI.COM

1. INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO

Os EXTENSORES PRONEO – ENFIT são extensores enterais, primariamente utilizados para interconectar uma seringa enteral (colocada em uma bomba de seringa, ou utilizada em alimentação manual) a uma sonda transnasal, utilizada para nutrição enteral em pacientes com o Trato Gastrointestinal (TGI) intacto, porém, incapazes de ingerir o aporte calórico necessário por via oral, necessitando de suplementação nutricional.

2. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Cada extensor é acondicionado em envelope tipo peel off, composta por papel de grau médico e folha de poliamida (PA) e polietileno (PE). A embalagem secundária é constituída por caixa de papel cartão ondulado (papelão), onde são acondicionadas 30 embalagens primárias.

Cada embalagem contém um extensor, de acordo com a referência.

3. COMPONENTES

Características dos Extensores ProNeo ENFit:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
BR7752006 7752006	Extensor ProNeo ENFit, 30 cm	1.9 mm	30 cm
BR7752005 7752005	Extensor ProNeo ENFit, 30 cm	1.9 mm	120 cm

EXTENSORES PRONEO

3.1. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

- Conexão ENFit, específica para a nutrição enteral, evitando conexões com dispositivos intravenosos (IV);
- Clamp que permite interromper o fluxo de nutrição, dando maior segurança à administração de nutrição;
- Tubo em poliuretano;
- Tampa protetora.

4. CONTRAINDICAÇÕES

A nutrição enteral é contraindicada em casos de anormalidades congênitas do Trato Gastrointestinal (TGI), íleo paralítico, obstrução mecânica do intestino, perfuração intestinal ou enterocolite necrosante.

Quadros de dismotilidade intestinal, megacólon tóxico, peritonite, sangramentos no TGI, fístulas digestivas de alta importância, vômitos severos e diarreias intratáveis são considerados contraindicações condicionais, onde a administração de nutrição enteral deve respeitar os limites de tolerância do paciente.

5. MODO DE UTILIZAÇÃO

1. PREPARAÇÃO

Ao conectar o extensor a uma seringa pré-carregada, certifique-se de que o clamp do extensor está bem fechado, e de que o mesmo está bem conectado à seringa.

2. INSTALAÇÃO

Coloque a seringa conectada ao extensor na bomba de infusão enteral. Retire a tampa de proteção do extensor ProNeo e conecte o extensor à sonda de alimentação. Abra o clamp do extensor antes de iniciar a infusão da nutrição / fluidos. Após abrir o clamp, ligue a bomba de infusão.

IMPORTANTE NOTAR:

Não utilize o dispositivo fora de sua data de validade.
Não utilize um mesmo extensor por mais de 24 horas.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Peças pequenas podem representar um perigo de asfixia para crianças. O dispositivo deve ser usado apenas sob supervisão de adultos.

EXTENSORES PRONEO

FABRICADO POR:

Fresenius Kabi AG

Else Kröner-Str. 1
61352, Bad Homburg
Alemanha

IMPORTADO / DISTRIBUÍDO POR

Fresenius Kabi Brasil Ltda.

Av. Marginal Projetada, 1652
Barueri-SP
C.N.P.J. 49.324.221/0001-04
SAC: 0800 707 3855

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Cíntia Motta Pereira Garcia
CRF-SP: 34.871

Registro ANVISA nº 80145110250

Estéril – Óxido de Etileno

Produto de uso único. Proibido reprocessar

Manter em temperatura ambiente e em local protegido da umidade.

Lote, Data de fabricação e Data de validade: vide rótulo do produto.
