

---

**SERINGA FREKA CONNECT ENFIT/PRONEO**

---

**REF**

9000788LDT / BR9000788LDT – Freka Connect ENFit/ProNeo 1 ml  
9000782LDT / BR9000782LDT – Freka Connect ENFit/ProNeo 2,5 ml  
9000783LDT / BR9000783LDT – Freka Connect ENFit/ProNeo 5 ml  
9000784S / BR9000784S – Freka Connect ENFit/ProNeo 10 ml  
9000785S / BR9000785S – Freka Connect ENFit/ProNeo 20 ml  
9000786S / BR9000786S – Freka Connect ENFit/ProNeo 60 ml  
9000787 / BR9000787 – Freka Connect ENFit/ProNeo 100 ml

**VERSÃO DE INSTRUÇÃO DE USO: BR900078/V00****REVISADO EM: 05/05/2021**

---

**ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO**

PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO (IFU) TAMBÉM EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR ATRAVÉS DO SAC 0800-707-3855 OU ATRAVÉS DO E-MAIL [FRESENIUS.BR@FRESENIUS-KABI.COM](mailto:FRESENIUS.BR@FRESENIUS-KABI.COM)

---

**1. INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO**

As seringas enterais Freka Connect ENFit/ProNeo são dosadores enterais. Possuem diferentes dimensões, variando de 1 ml a 100 ml, sendo disponíveis nos volumes de 1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml e 100 ml, permitindo medir de forma precisa a quantidade de fluido a ser infundida.

Estes dosadores são projetados para serem utilizados em conjunto com sondas nasogástricas (via oral) e sondas de alimentação gástricas ENFit, bem como outros produtos com a conexão ENFit, como equipos enterais. Podem ser utilizadas de forma gravitacional, ou em bombas de infusão para as quais estejam homologadas.

As seringas Freka Connect ENFit/ProNeo estão indicadas para pacientes que não conseguem, não devem ou não querem se alimentar por via oral, e que fazem uso de sondas nasais, percutâneas, ou sondas de reposição do tipo botton.

A nutrição enteral neste cenário permite uma terapia individualizada e auxilia a prevenir e tratar quadros de desnutrição, dando o suporte para que a saúde do paciente seja reestabelecida com maior rapidez.

A conexão ENFit torna estes produtos incompatíveis com a conexão do tipo Luer, evitando a administração acidental de medicamentos ou outras substâncias com indicação para via ora (EN), em via intravenosa (IV) ou via intratecal (IT).

As seringas enterais Freka Connect ENFit/ProNeo são dispositivos de uso único, estéreis, indicadas para a nutrição enteral.

---

---

## **SERINGA FREKA CONNECT ENFIT/PRONEO**

---

### **2. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO**

As seringas Freka Connect ENFit/ProNeo são apresentadas em embalagens primárias individuais do tipo blister, compostos por papel grau cirúrgico, polietileno (PE) e poliamida (PA). Trinta destas unidades primárias são então colocadas em caixa de papel cartão, configurando a embalagem secundária do produto.

Estas caixas são então acomodadas em novas caixas de papel ondulado, nas quantidades de 2, 12, 16 ou 20 unidades, conforme pedido do cliente.

### **3. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO**

As seringas enterais Freka Connect ENFit/ProNeo são dosadores enterais. Possuem diferentes dimensões, variando de 1 ml a 100 ml, sendo disponíveis nos volumes de 1 ml, 2.5 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml e 100 ml, permitindo medir de forma precisa a quantidade de fluido a ser infundida.

Estes dosadores são projetados para serem utilizados em conjunto com sondas nasogástricas (via oral) e sondas de alimentação gástricas ENFit, bem como outros produtos com a conexão ENFit, como equipos enterais.

Não possuem látex ou DEHP em sua composição.

### **4. CONTRAINDICAÇÕES**

Não se aplica.

### **5. MODO DE UTILIZAÇÃO**

Antes de utilizar, verificar se a embalagem está intacta. Em caso de violações, descartar o produto.

Remover o dispositivo de sua embalagem, cuidadosamente.

Aspirar o conteúdo a ser infundido no paciente, tomando os cuidados de assepsia necessários.

Conectar a seringa ao dispositivo médico alvo e prosseguir com a infusão.

Após o uso, descartar a seringa de acordo com os procedimentos da instituição de saúde e normas regulatórias.

### **FABRICADO POR:**

**Fresenius Kabi AG**

Else Kröner-Str. 1

61352, Bad Homburg

Alemanha

---

---

**SERINGA FREKA CONNECT ENFIT/PRONEO**

---

**IMPORTADO / DISTRIBUÍDO POR**

**Fresenius Kabi Brasil Ltda.**

Av. Marginal Projetada, 1652

Barueri-SP

C.N.P.J. 49.324.221/0001-04

SAC: 0800 707 3855

**RESPONSÁVEL TÉCNICA**

Cíntia Motta Pereira Garcia

CRF-SP: 34.871

Registro ANVISA nº 80145119021

Estéril – Óxido de Etileno

Produto de uso único. Proibido reprocessar

Manter em temperatura ambiente e em local protegido da umidade.

**Lote, Data de fabricação e Data de validade: vide rótulo do produto.**