

---

## SERINGA INJECTOMAT SEM CÂNULA

---

**REF** BRLM93000010/ M93000010

**VERSÃO DE INSTRUÇÃO DE USO: BRM93000010/V00**

**REVISADO EM: 20/07/2022**

---

### **ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO**



PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO (IFU) TAMBÉM EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR ATRAVÉS DO SAC 0800-707-3855 OU ATRAVÉS DO E-MAIL [FRESENIUS.BR@FRESENIUS-KABI.COM](mailto:FRESENIUS.BR@FRESENIUS-KABI.COM)

---

### **MODO DE USO DO PRODUTO:**

1. Verifique a integridade das embalagens unitárias;
2. Abra a embalagem através da técnica asséptica;
3. Verifique se a cânula está conectada adequadamente antes do uso;
4. Mantenha a cânula coberta com o protetor até o momento do uso para evitar danos à ponta e contaminação da agulha;
5. Prossiga com a aspiração do conteúdo a ser infundido, respeitando as recomendações de assepsia de seu local de trabalho;
6. Após preencher a seringa com o conteúdo necessário, remova a cânula da mesma, de forma que a seringa possa ser encaixada corretamente na bomba de infusão.

### **ATENÇÃO**

Cuidado na hora de descartar a cânula. Recoloque o protetor nas agulhas utilizando técnica passiva de recolocação, isto é, não segurando o protetor da agulha durante a recolocação, e não forçando-o contra a ponta da agulha, evitando que esta penetre o protetor. Siga as recomendações do serviço de saúde para a prevenção de acidentes com perfurocortantes.

6. Ao terminar o procedimento de infusão, a seringa também deve ser descartada em local adequado, conforme requisitos da legislação sanitária vigente, e recomendações do serviço de saúde.

### **PRECAUÇÕES RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO, BEM COMO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

- Não utilizar após a data de validade.
  - Produto médico de uso único.
  - Este dispositivo é estéril.
  - Proibido reprocessar.
  - Destruir após o uso.
  - Manter em temperatura ambiente e em local protegido da umidade.
  - Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou danificada.
-

---

## SERINGA INJECTOMAT SEM CÂNULA

---

- Não é permitida administração da medicação diretamente no paciente, o mesmo será administrado através de bomba de infusão com o uso de extensores que se conectam ao acesso venoso.

### **INDICAÇÕES**

As seringas Injectomat são indicadas para o uso com bombas de infusão de seringa. São seringas de uso único para infusão de drogas e podem ser utilizadas com extensores para infusão em Bomba de Seringa. São dispositivos para infusão compatível com bombas de seringa com o uso de extensores / perfusores.

### **CONTRAINDICAÇÕES**

- Não se aplica.

### **FABRICADO POR:**

**Fresenius Kabi AG**

Else Kröner-Str. 1  
61352, Bad Homburg  
Alemanha

### **IMPORTADO / DISTRIBUÍDO POR**

**Fresenius Kabi Brasil Ltda.**

Av. Marginal Projetada, 1652  
Barueri-SP  
C.N.P.J. 49.324.221/0001-04  
SAC: 0800 707 3855

### **RESPONSÁVEL TÉCNICA**

Cíntia Motta Pereira Garcia  
CRF-SP: 34.871

Registro ANVISA nº 80145119030

Estétil – Óxido de Etileno

Produto de uso único. Proibido reprocessar

Armazenar em temperatura ambiente e em local protegido da luz e umidade.

**Lote, Data de fabricação e Data de validade: vide rótulo do produto.**

