



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Freka[®]

Trelumina, ENFit




Freka[®] Trelumina, ENFit

Trelumensonde, der muliggør samtidig tilførsel af ernæring i tyndtarmen og drænage fra ventriklen.

Intestinalsonde (FR 9, 150 cm)

Med en afrundet, åben, distal ende samt to laterale åbninger (jejunal placering)

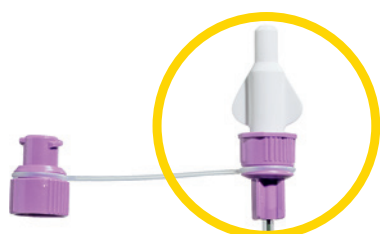


Tovejs-ventilationskanal

Uden mulighed for tilkobling af sprøjter




Ventrikelsonde (CH 16, 95 cm)

Med en afrundet distal ende med fem laterale åbninger (placering i ventrikel)

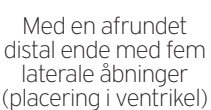

Fleksibel tip

Åben ende beregnet til Seldinger-teknik. Flexibel i forbindelse med endoskopisk anlæggelse

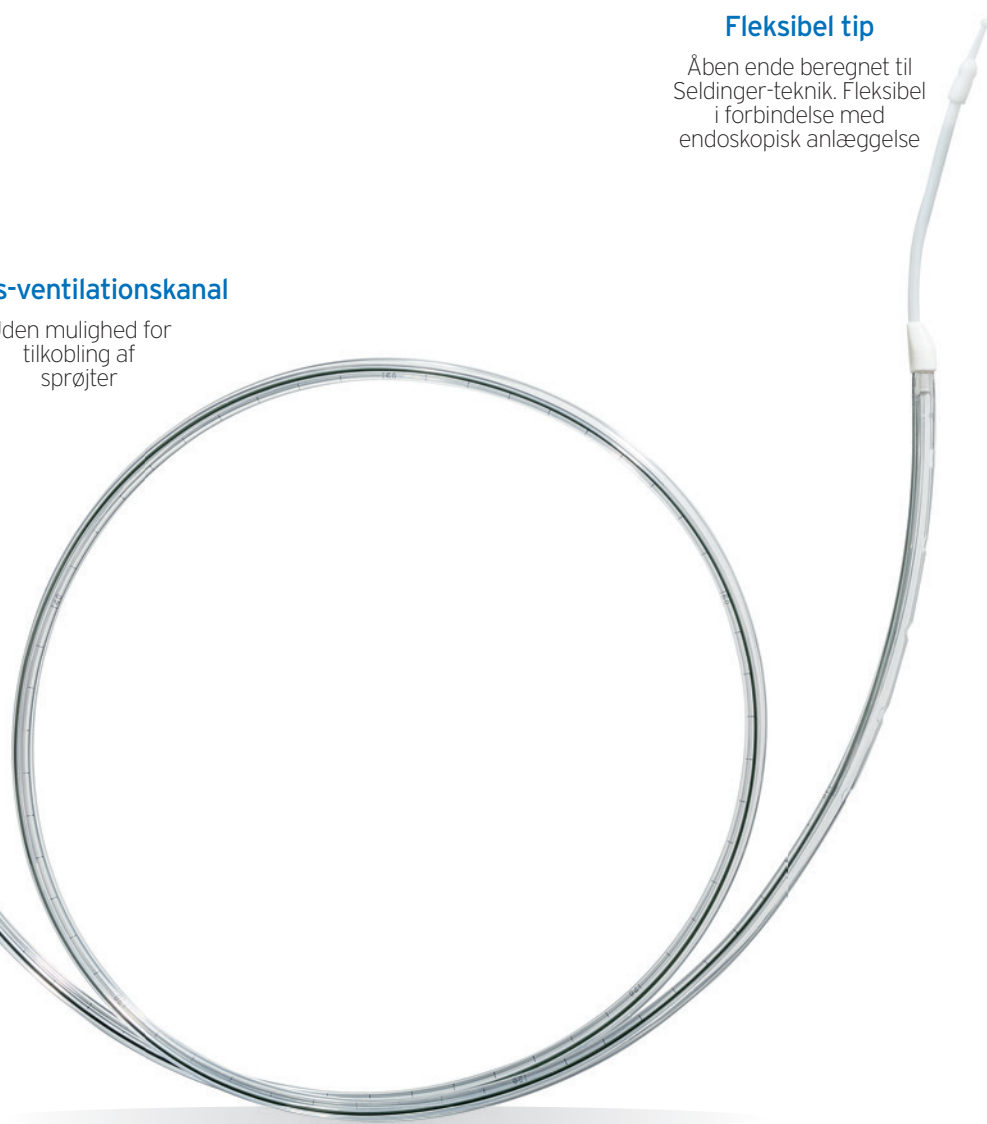

Én sonde – flere funktioner



Ernæring

Muliggør tidlig enteral ernæring i tyndtarmen



Diagnosticering

- Analyse af mavesaft
- Bestemmelse af pH-værdi
- Tidlig registrering og behandling af ventrikelblødning

Overvågning

- Aspirationsprofylakse
- Vurdering af ventrikelretention

Dekompression

Ventilationskanal mindsker risiko for fastsugning i mucosa ved aktiv sugning



Behandling

- Mulighed for at give medicin i ventriklen og jejunum
- Mulighed for at drænere ventrikelindhold
- Mulighed for skylning ved ventrikelblødning

Ventrikelsonden har 5 store laterale åbninger for effektiv drænage

Anlæggelse

Freka Trelumina kan anlægges på tre forskellige måder:


1. Transnasalt under røntgenmonitorering
2. Transnasalt under endoskopisk kontrol (se næste side)
3. Endoskopisk med Seldinger-teknik (se næste side)

Metoder for endoskopisk anlæggelse

Freka® Trelumina, ENFit


Transnasal endoskopisk kontrolleret anlæggelse

1

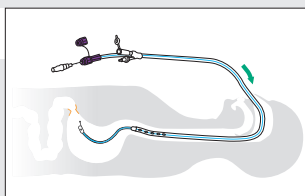


Indfør Freka® Trelumina transnasalt ned til ventriklen

2

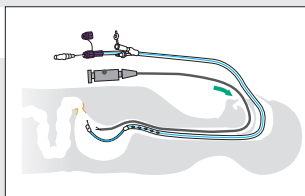


Indsæt endoskopet via munden til ventriklen

3

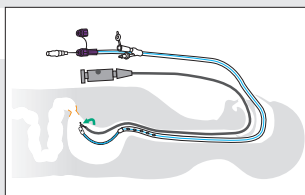


Grib fat i den fleksible tip vha. endoskopets gribetang

4

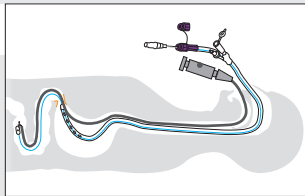

Anbring ernæringssonden gennem pylorus bag Treitz ligament


5

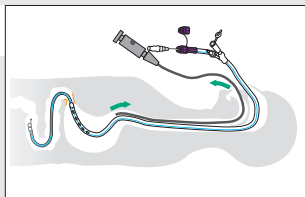

Fjern forsigtigt endoskopet og hold Freka® Trelumina på plads, indtil endoskopet er helt ude. Fjern forsigtigt guidewiren. Sondens markering ved næseboret skal dokumenteres. Fiksér sonden.


Endoskopisk anlæggelse med Seldinger-teknik

1

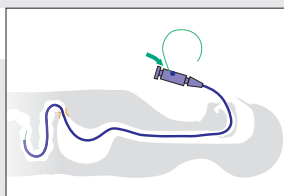


Fugt seldinger-wiren. Placér wiren i jejunum, helst forbi Treitz ligament, via endoskopets arbejdskanal under visuel kontrol

2

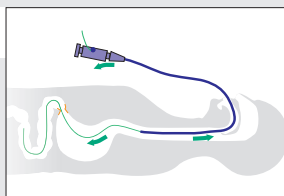


Fjern endoskopet fra wiren. Hold wiren på plads med modsatrettede bevægelser

3

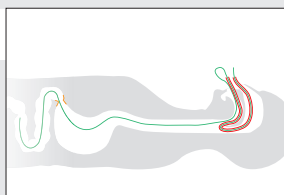


Omdirigér seldinger-wiren fra munden ud gennem næsen

4

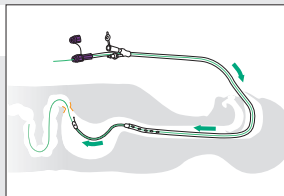

Fjern guidewiren i Freka Trelumina. Skub sonden over seldinger-wiren, indtil den ønskede position nås. Hold seldinger-wiren stram.

5

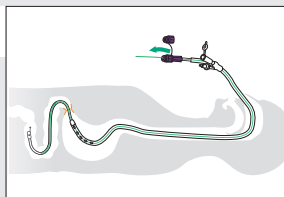

Fjern seldinger-wiren langsomt og kontrolleret. Sondens markering ved næseboret skal dokumenteres. Fiksér sonden.

	Produkt	Pakningsstørrelse	Varenummer
Freka® Trelumina ENFit	Jejunal: FR 9, længde 150 cm, ENFit kobling Gastrisk: FR 16, længde 95 cm, Tragttilkobling	5 stk.	7981834

MD_0023/Januar 2021