



sanabelle Beinbeutel U240

Merkmale:

- Geschlossenes Urindrainagesystem
- 750 ml Volumen
- Schlauchlänge 66 cm
- Belüftete Tropfkammer
- Belüftungsfilter
- Rücklaufsperr
- Ablassventil
- Vliesrückseite
- Steril

Einsatzgebiete / Indikationen:

- Dauerurinaireitung in Verbindung mit transurethralen oder suprapubischen Blasenkathetern, Urinalkondomen sowie sonstigen internen und externen Urinableitern für mobile Patienten.

Anschluss und Wechsel:

- Nach der Anlage eines Katheters oder eines Urinalkondoms wird der Beinbeutel unter sterilen Bedingungen angeschlossen.
- Der Wechsel des Bettbeutels findet bei Funktionsstörungen oder nach spätestens 14 Tagen statt.
- Vor dem Wechsel die Verbindungsstelle zwischen Beutel und Urinableiter mit einer geeigneten Desinfektionslösung desinfizieren; Einwirkzeit der Lösung beachten.
- Den neuen Beutel unter sterilen Bedingungen konnektieren.
- Der vollständig entleerte Beutel kann grundsätzlich im Hausmüll entsorgt werden.

Befestigungsmöglichkeiten:

- Die Aufhängung muss unterhalb des Blasen-niveaus mit senkrechter Tropfkammer erfolgen; Bodenkontakt ist zu vermeiden. Zur Fixierung am Bein verfügt der Beutel über seitliche Schlitz für Haltebänder.
- Abknicken und Durchhängen des Schlauchsystems sind zu vermeiden, da dies zu Abflussstörungen führen kann.
- Die Vliesrückseite ermöglicht ein komfortables Tragen des Beutels am Bein.

Entleerung:

- Der Bettbeutel muss rechtzeitig entleert werden, bevor der Urin die Rücklaufsperr erreicht.
- Zum Entleeren das Ablassventil aus der Einstecklasche ziehen und das Ablassventil öffnen. Den Urin in ein bereitgestelltes Auffanggefäß fließen lassen.
- Ablassventil schliessen und in die Einstecklasche zurück schieben.

Sonstige Hinweise:

- Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.
- Nicht verwenden, wenn die Sterilverpackung beschädigt oder bereits geöffnet ist.
- Frischurin-Proben können an der nadelfreien Punktierstelle entnommen werden.
- Produkt nur zum Einmalgebrauch. Nach Gebrauch entsorgen. Produkt darf nicht wiederverwendet und nicht resterilisiert werden. Wiederverwendung birgt das Risiko einer Infektion von Patient und / oder Anwender und kann die Leistung des Produktes bis hin zum Funktionsausfall beeinträchtigen.

Bestellinformationen

Produkt	Bestelleinheit	Artikel-Nr.
sanabelle Beinbeutel U 240	60	77712804

