

sanabelle Bettbeutel U130

REF 77712801

Schlauchlänge 120 cm

PZN 1 Stk. 05973090

PZN 90 Stk. 06089656

Merkmale:

- 2000 ml Volumen
- 120 cm Schlauchlänge
- Rücklaufsperr
- Ablassventil
- Steril

Einsatzgebiete / Indikationen:

- Dauerurinableitung in Verbindung mit transurethralen oder suprapubischen Blasenkathetern, Urinalkondomen sowie sonstigen internen und externen Urinaleitern.

Anschluss und Wechsel:

- Nach der Anlage eines Katheters oder eines Urinalkondoms wird der Bettbeutel unter sterilen Bedingungen angeschlossen.
- Der Wechsel des Bettbeutels findet bei Funktionsstörungen oder nach spätestens 7 Tagen statt.
- Vor dem Wechsel die Verbindungsstelle zwischen Beutel und Urinaleiter mit einer geeigneten Desinfektionslösung desinfizieren; Einwirkzeit der Lösung beachten.
- Den neuen Beutel unter sterilen Bedingungen konnektieren.
- Der vollständig entleerte Beutel kann grundsätzlich im Hausmüll entsorgt werden.

Befestigungsmöglichkeiten:





- Die Aufhängung muss unterhalb des Blaseniveaus erfolgen; Bodenkontakt ist zu vermeiden. Zur Aufhängung verfügt der Beutel über Ösen am oberen Beutelrand.
- Abknicken und Durchhängen des Schlauchsystems sind zu vermeiden, da sie zu Abflussstörungen führen können.

Entleerung:

- Der Bettbeutel muss rechtzeitig entleert werden, bevor der Urin die Rücklaufsperr erreicht.
- Zum Entleeren das Ablassventil öffnen. Den Urin in ein bereitgestelltes Auffanggefäß fließen lassen.
- Ablassventil schließen.

Sonstige Hinweise:

- Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.
- Nicht verwenden, wenn die Sterilverpackung beschädigt oder bereits geöffnet ist.
- Produkt nur zum Einmalgebrauch. Nach Gebrauch entsorgen. Produkt darf nicht wiederverwendet und nicht resterilisiert werden. Wiederverwendung birgt das Risiko einer Infektion von Patient und / oder Anwender und kann die Leistung des Produktes bis hin zum Funktionsausfall beeinträchtigen.

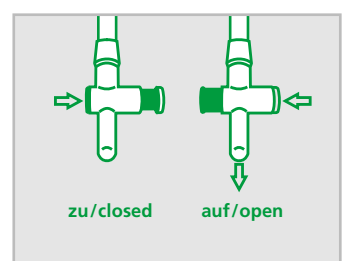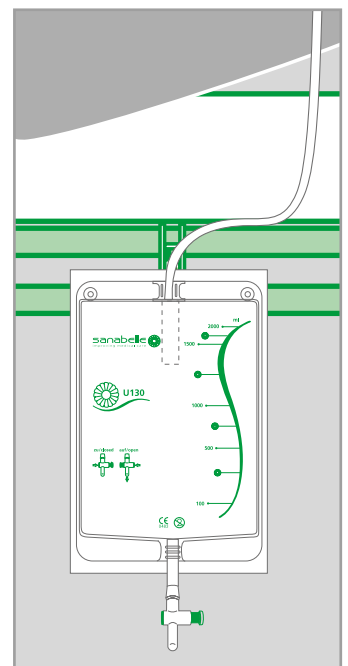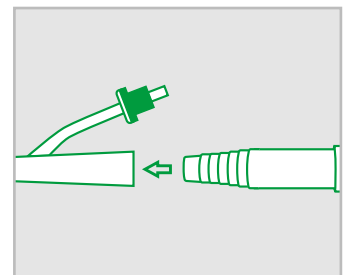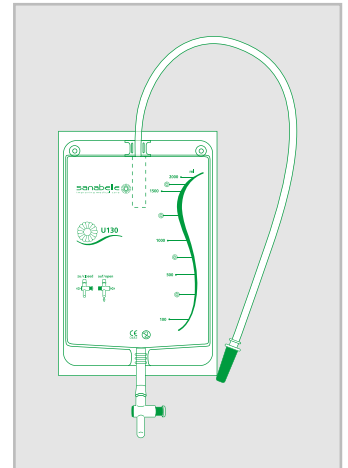

CE
0483