

wir helfen Menschen

Ihren Einsatz für Therapieerfolg und Lebensqualität möchten wir einfacher und sicherer machen und die Lebensqualität von Patienten und Pflegebedürftigen stetig steigern. Wir übernehmen Verantwortung für hochwertige, individuell abgestimmte Produkte und Dienstleistungen in den Leistungsbereichen:

Ernährung

Für die enterale Ernährung bieten wir Ihnen Trink- und Sondennahrungen sowie Supplemente. Das Programm für die parenterale Ernährung reicht von Mehrkammerbeuteln bis zu Einzelkomponenten wie Fettemulsionen, Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen. Bei unseren therapieübergreifenden, bundesweiten Versorgungsstrukturen setzen wir uns höchste Qualitätsstandards.

Arzneimittel

Für die intravenöse Therapie kritisch kranker Menschen haben wir ein umfangreiches Produktprogramm von generischen Arzneimitteln wie Antibiotika und Anästhetika sowie Arzneimitteln für die Onkologie. Ihre vielfältigen Therapien unterstützen wir mit systematisch abgestimmten Applikationstechniken.

Infusionen

Unser Angebot umfasst Volumenersatz-, Träger- und Elektrolytlösungen sowie spezifische Lösungen für die Pädiatrie in modernen und anwendungsfreundlichen Primärbehältnissen. Wir unterstützen Ihre therapeutische Arbeit durch umfangreiche Dienstleistungen, wie eine computergestützte Kompatibilitätsdatenbank und eine breite wissenschaftliche Basis.

Medizinprodukte

Für Ernährung, Infusionen, Arzneimittel und Blutkomponenten bieten wir Ihnen präzise aufeinander abgestimmte Applikationstechnik und -systeme an. Das Produktprogramm wird durch die Urologie, die Tracheostomie und die moderne Wundversorgung abgerundet.




**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Vasodrop® Safety

Sicherheitsvenenverweilkanüle

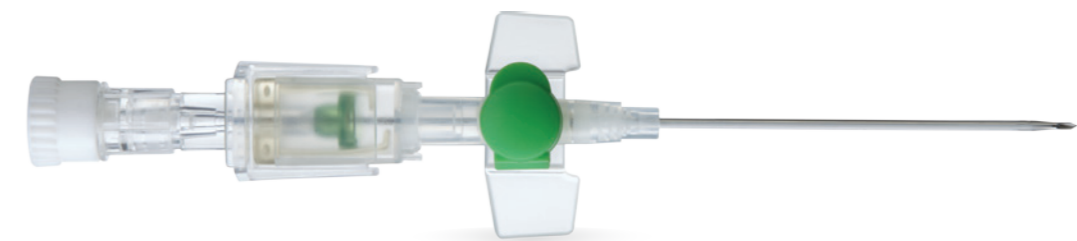

7301391 (0817/AC)



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de


Sicherheitsrisiko Nadelstichverletzungen

Nadelstichverletzungen sind eine alltägliche Gefahr für Beschäftigte im Gesundheitswesen.


Im Durchschnitt stechen sich Beschäftigte einmal pro Jahr, wobei geschätzt bis zu 90% der Stichverletzungen nicht gemeldet werden.¹

Bei ca. 750.000 Beschäftigten im stationären Gesundheitswesen (BIG) geht man von einer Dunkelziffer von rund 500.000 Nadelstichverletzungen im Jahr aus.

Sicherheitsvenenverweilkanüle Vasodrop® Safety

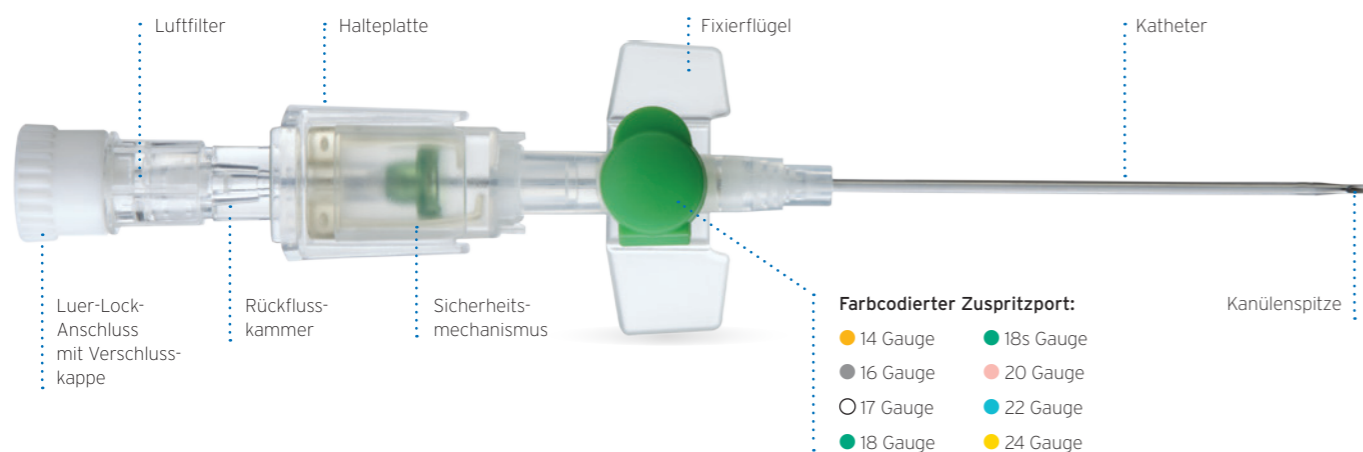


Vasodrop® Safety - Die wichtigsten Eigenschaften und ihr Nutzen

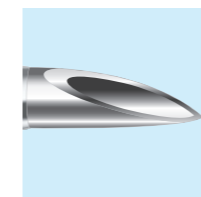

Kanülenspitze:

- Dreifach geschärft und rückseitiger Schliff, für eine atraumatische Punktion

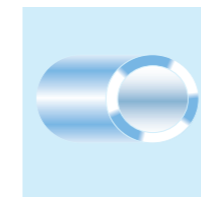

Katheter:

- Widerstandsfähig, flexibel und knickfest.
- Drei eingebettete Röntgenkontraststreifen machen den Katheter auf dem Röntgenbild sichtbar



Sicherheitsmechanismus:

- Vermeidet das Risiko von Nadelstichverletzungen
- Erfordert keine Änderung der Handhabung
- Passive Aktivierung beim Herausziehen der Kanüle
- Spitze der Kanüle wird vollständig bedeckt
- Keine freiliegenden Metallteile: keine Kratzer, keine Kontaminierung



Rückflusskammer:

- Durchsichtig - wenn Blut erscheint, ist die Vene punktiert


Handhabung der Vasodrop® Safety




Halten Sie die Sicherheitsvenenverweilkanüle in der von Ihnen gewohnten Punktionstechnik. Entfernen Sie die Kanülenschutzkappe mit einer drehenden Ziehbewegung. Punktieren Sie die Vene in einem flachen Winkel.



Achten Sie auf das Befüllen der Rückflusskammer mit Blut.

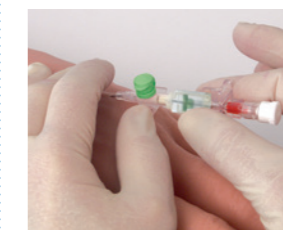

Sobald der Blutrückfluss erkennbar ist, schieben Sie den Katheter langsam über die Punktionskanüle in die Vene vor. Bitte halten Sie die Punktionskanüle hierbei immer an der Halteplatte fest und nicht am Sicherheitsmechanismus!

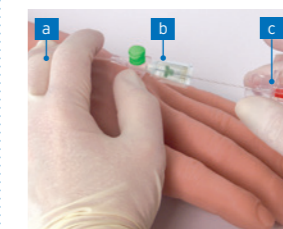

Befindet sich der Katheter in der Endposition, wird die Vene direkt oberhalb der Katheterspitze okkludiert (a), der Katheter fixiert (b) und die Punktionskanüle durch Ziehen an der Halteplatte (c) herausgezogen, bis sich der Sicherheitsmechanismus selbstständig vom Katheter trennt. Entsorgen Sie die Sicherheitspunktionskanüle in einem geeigneten Kanülenabwurfbehälter.

Vasodrop® Safety Sicherheitsvenenverweilkanüle

Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	Gauge	Kanülenlänge [mm]	AD Ø [mm]	Flussrate [ml/min]
	50	8301707	04790140	24	19	0,74	29
	50	8301706	04790186	22	25	0,90	42
	50	8301705	04790192	20	32	1,00	59
	50	8301704	04791872	18	45	1,30	96
	50	8301703	04791984	18s	32	1,30	103
	50	8301702	04794942	17	45	1,50	155
	50	8301701	04794959	16	45	1,75	225
	50	8301700	04794965	14	45	2,00	290

* Verpackungseinheit

Mandrin für Vasodrop® Safety Sicherheitsvenenverweilkanüle

Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	Gauge	Kanülenlänge [mm]	AD Ø [mm]	Flussrate [ml/min]
	50	8301715	04794971	24	20		
	50	8301714	04794988	22	25		
	50	8301713	04795344	20	32		
	50	8301712	04795373	18	45		
	50	8301711	04795404	18s	32		
	50	8301710	04795410	17	45		
	50	8301709	04795456	16	45		
	50	8301708	04796208	14	45		

* Verpackungseinheit

1. Wittmann A, Verletzungen an spitzen und/oder scharfen Gegenständen im Gesundheitsdienst - Ein Beitrag zur Abschätzung der Risiken: edition FFAS Freiburg; 2005