



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

sanabelle

Absauggeräte & Zubehör

Für die sichere Anwendung im
Bereich der Sekretabsaugung



© iStockphoto.com / Ruslan Guzov - Shutterstock.com
© iStockphoto.com / Ruslan Guzov - Shutterstock.com / Urheber: Ruslan Guzov



Trachealabsauggeräte

sanabelle Trachealabsauggeräte, stationär & mobil

Die sanabelle Absauggeräte der S-Serie eignen sich für den stationären Einsatz (S = stationär),- auch im Homecare-Bereich.

Die Vakuumregelung erfolgt über den Vakuumregler, die korrekte Einstellung kann anhand des Vakuummeters überprüft werden.

Sowohl das sanabelle M20-Absauggerät als auch die Geräte der sanabelle M^{Plus}-Serie eignen sich für den mobilen Einsatz (M = mobil). Hohe Akkukapazitäten, LED Statusanzeigen sowie die Möglichkeit des Akkuladens mittels des dazugehörigen Netzgerätes - auch während der Nutzung - garantieren dem Anwender eine hohe Zuverlässigkeit im mobilen Einsatz.



Mobile Geräte mit farbiger LED-Statusanzeige

Anwendungsbereich

- ▶ Speziell geeignet für die temporäre Absaugung von Sekreten

Eigenschaften

- ▶ Abmessungen Grundgerät (HxBxT) [in mm]: 290 x 259 x 130
- ▶ Vakuumregler
- ▶ Vakuum: max. -90 kPa
- ▶ Einheitliches Zubehör für alle sanabelle Absauggeräte der Serien S, M und M^{Plus}
- ▶ Mehrwegbehälter 1000 ml (1 Sekretgefäß mit Deckel, 1 Spülgefäß)
- ▶ Saugschlauch: PVC, Innendurchmesser 6 mm, Wandstärke 2 mm, Länge 150 cm

Doppel-Filter-System (DFS®)

- ▶ Garantiert zuverlässigen Schutz vor Kontamination im Geräteinneren
- ▶ Wechsel des Filtersystems ohne Öffnung des Gehäuses
- ▶ Minimaler Zeit- und Materialeinsatz bei der Wiederaufbereitung



Doppel-Filter-System DFS®

Absauggeräte-Zubehör

sanabelle Bakterienfilter

Der sanabelle Bakterienfilter lässt Gase frei passieren während Bakterien und Viren effizient zurückgehalten werden. Dies unterbindet die Verbreitung von Keimen des Patienten über die Abluft des Gerätes.

Zum Geräteschutz verschließt sich die hydrophobe Filtermembran bei Kontakt mit Flüssigkeit, wodurch eine Beschädigung des Absauggerätes verhindert wird.



Patientenseite

Geräteseite

Verständliche Piktogramme
für mehr Sicherheit beim Filterwechsel

Anwendungsbereich

- ▶ Bakterien- und Virenfilter für Absauggeräte zum Schutz vor Kontamination und Übersaugung

Eigenschaften

- ▶ Filtermedium: hydrophobe PTFE-Filtermembran
- ▶ Effizienz der Bakterien- und Virenfiltration: 99,9999 %
- ▶ Passend für Schläuche mit 6-7 mm Durchmesser
- ▶ Mit verständlichen Piktogrammen für mehr Sicherheit beim Filterwechsel
- ▶ Zum Einmalgebrauch
- ▶ Einzeln hygienisch verpackt

Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
sanabelle TS700 Bakterienfilter	5	ME77700430	09283637	01.99.99.0002


* Verpackungseinheit

Absauggeräte-Zubehör

sanabelle Wechselset & Silikonschläuche

Das sanabelle Wechselset vereint alle notwendigen Komponenten, die aus hygienischen Gesichtspunkten einem regelmäßigen Wechsel unterliegen. Für einen einfachen Austausch ist der Bakterienfilter bereits mit Schlauchverbinder und Winkeladapter vorkonnectiert. So bleiben Gerät und Umwelt optimal geschützt.

Die in drei Längen erhältlichen latexfreien sanabelle Silikonschläuche gewährleisten ein dauerhaft hygienisches Absaugen und können in Verbindung mit allen gängigen Absauggeräten verwendet werden.

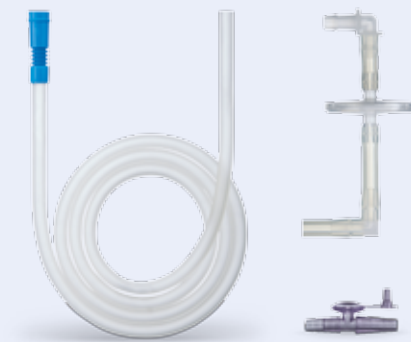

sanabelle TS600 Wechselset

Lieferumfang

sanabelle TS600 Wechselset (hygienisch verpackt):

- ▶ 1 Fingertip (einzeln steril verpackt),
- ▶ 1 Geräteschutz (im Peelpack hygienisch verpackt)
- ▶ 1 PVC-Schlauch mit Knickschutz (Länge 150 cm, einzeln steril verpackt)

Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
sanabelle TS600 Wechselset	1	ME77710020	11227037	–
sanabelle Verbindungsschlauch für Absauggeräte (30 cm, einzeln hygienisch verpackt) **	1	ME77710061	10914221	01.99.99.0001
sanabelle Absaugschlauch für Absauggeräte (130 cm, einzeln hygienisch verpackt) **	1	ME77710062	10914190	01.99.99.0001
sanabelle Silikonschlauch für Absauggeräte (25 m, einzeln hygienisch verpackt) **	1	ME77710063	11077247	01.99.99.0001

* Verpackungseinheit

** Innendurchmesser: 6 mm, Außendurchmesser: 12 mm

Bestellinformationen & technische Daten

sanabelle Trachealabsauggeräte – Bestellinformationen

Artikel	VE*	Art.-Nr.	PZN	Netzabhängig / Netzunabhängig	Aggregat- saugleistung	HiMi.-Nr.
sanabelle S20K	1	ME77700405	03461227	Netzabhängig (stationär)	18 l/min ± 2 l/min (low flow)	01.24.01.0023
sanabelle S20	1	ME77700406	03461256	Netzabhängig (stationär)	18 l/min ± 2 l/min (low flow)	01.24.01.0024
sanabelle S30	1	ME77700407	03461262	Netzabhängig (stationär)	28 l/min ± 2 l/min (high flow)	01.24.01.1016
sanabelle M20	1	ME77700408	03461397	Netzunabhängig (mobil)	18 l/min ± 2 l/min (low flow)	01.24.02.0018
sanabelle M20 ^{Plus}	1	ME77700409	11524485	Netzunabhängig (mobil)	22 l/min ± 2 l/min (low flow)	01.24.02.1015
sanabelle M30 ^{Plus}	1	ME77700410	11524491	Netzunabhängig (mobil)	30 l/min ± 2 l/min (high flow)	01.24.02.1015

sanabelle Trachealabsauggeräte – technische Daten

Artikel	Art.-Nr.	Leistungs- aufnahme	Gewicht (Grundgerät)	Betriebsdauer	Ladezeit bei leerem Akku	Schallemission (ohne Vakuum)
sanabelle S20K	ME77700405	156 W	3,5 kg	20 Min. AN, 40 Min. AUS	–	ca. 66 dB (A)
sanabelle S20	ME77700406	80 W	3,4 kg	Kontinuierlich	–	ca. 55 dB (A)
sanabelle S30	ME77700407	80 W	4,1 kg	45 Min. AN, 10 Min. AUS	–	ca. 57 dB (A)
sanabelle M20	ME77700408	47 W bei 12 V	3,1 kg	ca. 45 Min. AN, 10 Min. AUS	2,5 - 3 Std.	ca. 62 dB (A)
sanabelle M20 ^{Plus}	ME77700409	60 W bei 12 V	3,1 kg	40 Min. AN, 10 Min. AUS	2,5 - 3 Std.	ca. 66 dB (A)
sanabelle M30 ^{Plus}	ME77700410	60 W bei 12 V	3,6 kg	40 Min. AN, 10 Min. AUS	2,5 - 3 Std.	ca. 66 dB (A)

* Verpackungseinheit

Lieferumfang

- ▶ M- und M^{Plus}-Serie: Trachealabsauggerät, Mehrweg-Sekretbehältersystem inkl. Schlauchset, Netzgerät inkl. Netzkabel
- ▶ S-Serie: Trachealabsauggerät, Mehrweg-Sekretbehältersystem inkl. Schlauchset, Netzkabel



wir helfen Menschen

Ihren Einsatz für Therapieerfolg und Lebensqualität möchten wir einfacher und sicherer machen und die Lebensqualität von Patienten und Pflegebedürftigen stetig steigern. Wir übernehmen Verantwortung für hochwertige, individuell abgestimmte Produkte und Dienstleistungen in den Leistungsbereichen:

Ernährung

Für die enterale Ernährung bieten wir Ihnen Trink- und Sondennahrungen sowie Supplemente. Das Programm für die parenterale Ernährung reicht von Mehrkammerbeuteln bis zu Einzelkomponenten wie Fettemulsionen, Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen. Bei unseren therapieübergreifenden, bundesweiten Versorgungsstrukturen setzen wir uns höchste Qualitätsstandards.

Arzneimittel

Für die intravenöse Therapie kritisch kranker Menschen haben wir ein umfangreiches Produktprogramm von generischen Arzneimitteln wie Antibiotika und Anästhetika sowie Arzneimitteln für die Onkologie. Ihre vielfältigen Therapien unterstützen wir mit systematisch abgestimmten Applikationstechniken.

Infusionen

Unser Angebot umfasst Volumenersatz-, Träger- und Elektrolytlösungen sowie spezifische Lösungen für die Pädiatrie in modernen und anwendungsfreundlichen Primärbehältnissen. Wir unterstützen Ihre therapeutische Arbeit durch umfangreiche Dienstleistungen, wie eine computergestützte Kompatibilitätsdatenbank und eine breite wissenschaftliche Basis.

Medizinprodukte

Für Ernährung, Infusionen, Arzneimittel und Blutkomponenten bieten wir Ihnen präzise aufeinander abgestimmte Applikationstechnik und -systeme an. Das Produktprogramm wird durch die Urologie, die Tracheostomie und die moderne Wundversorgung abgerundet.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.com/de