




**FRESENIUS
KABI**

caring for life

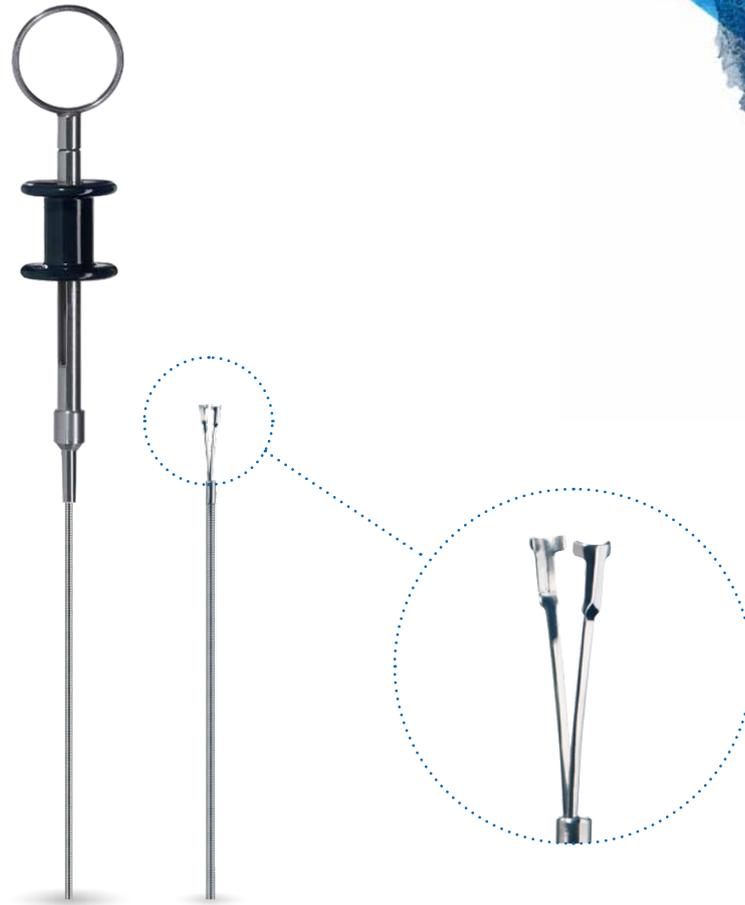

Ernährungs sonden- Fasszange

Von Wieser Medizintechnik
und Geräte GmbH

Ernährungs sonden-Fasszange für die endoskopische
Platzierung der Ernährungs sonden nach der
Vorschubmethode.

- Erleichtert die endoskopische
Applikation nach der Vorschubmethode
- Sichere und einfache Platzierung
von transnasalen und perkutanen
intestinalen Ernährungs sonden
- Verhindert aufgrund der Länge die
Dislokation der Ernährungs sonden
beim Rückzug des Endoskops
- Sondenspitze wird mit der Fasszange
in Position gehalten bis das Endoskop
im Magen oder im oberen Drittel des
Ösophagus liegt

Ernährungs sonden-Fasszange

von Wieser Medizintechnik und Geräte GmbH



Endoskopische Platzierung der Ernährungs sonde nach der Vorschubmethode



- Ernährungs sonde transnasal oder perkutan durch die liegende Führungssonde in den Magen schieben.
- Endoskop oral nach gastral einführen, dabei das Endoskop zur Sondenspitze führen.
- Die flexible Sondenspitze mit der Ernährungs sonden-Fasszange bei der transnasalen Ernährungs sonde im oberen Drittel des Ösophagus und bei der perkutanen Ernährungs sonde nach Luftinsufflation im Magen greifen.
- Die Sondenspitze durch den Pylorus hinter das Treitz'sche Band führen und platzieren.
- Bei Rückzug des Endoskops die Ernährungs sonde mit der Fasszange in Position halten, bis das Endoskop im Magen oder im oberen Drittel des Ösophagus liegt. Erst dann die Fasszange öffnen und vorsichtig zurückziehen. Dabei wird die schwarze Fingerspule unter Zug gehalten, damit sich das distale Ende der Fasszange nicht ungewollt öffnet und es zu Schleimhautläsionen kommt.

Tipp:

Die Ernährungs sonden-Fasszange lässt sich auch sehr gut zur Fremdkörper- und Stent-Entfernung einsetzen.

Bestellinformationen

Artikel	VE*	Art.-Nr.	Länge ca.
Ernährungs sonden-Fasszange	1 x 1	131-25-320	320 mm
Ernährungs sonden-Fasszange	1 x 1	131-25-230	230 mm
Ernährungs sonden-Fasszange	1 x 1	131-25-180	180 mm

*Verpackungseinheit

Technische Spezifikationen

Gesamtlänge	320 cm / 230 cm / 180 cm
Durchmesser	2,5 mm
Handgriff / Spirale	Edelstahl
Branchen	Edelstahl, nicht verletzend für den Arbeitskanal des Endoskops
Branchenlänge	18 mm
Öffnungsradius	10 mm

Wissenswertes

Verwendbarkeit	Die Ernährungs sonden-Fasszange kann in flexiblen Endoskopen mit einem Arbeitskanal von 2,8 mm verwendet werden. <ul style="list-style-type: none"> · Fujinon · Pentax · Olympus · Storz
Wiederverwendbarkeit und Aufbereitung	Die Ernährungs sonden-Fasszange kann nach validierten Prozessen gereinigt, desinfiziert und im Autoklaven bei 134° C sterilisiert werden. Für Instandhaltungs- und Servicefragen wenden Sie sich bitte an die Wieser GmbH.
Neu im Lieferprogramm	Im Außendurchmesser 1,8 mm für Endoskop mit einem Arbeitskanal von 2,0 mm.

Bestellung - Lieferung - Vertrieb nur durch:

Wieser Medizintechnik und Geräte GmbH | Eichenstraße 4, 82281 Egenhofen | Tel: 0 81 34 / 9 92 90 | Fax: 0 81 34 / 9 92 92
e-mail: kontakt@wiesermedizintechnik.de | www.wiesermedizintechnik.de



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen