




**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

# Hematype<sup>®</sup>

Beprobungsadapter für die sichere  
und hygienische Segmentblutentnahme



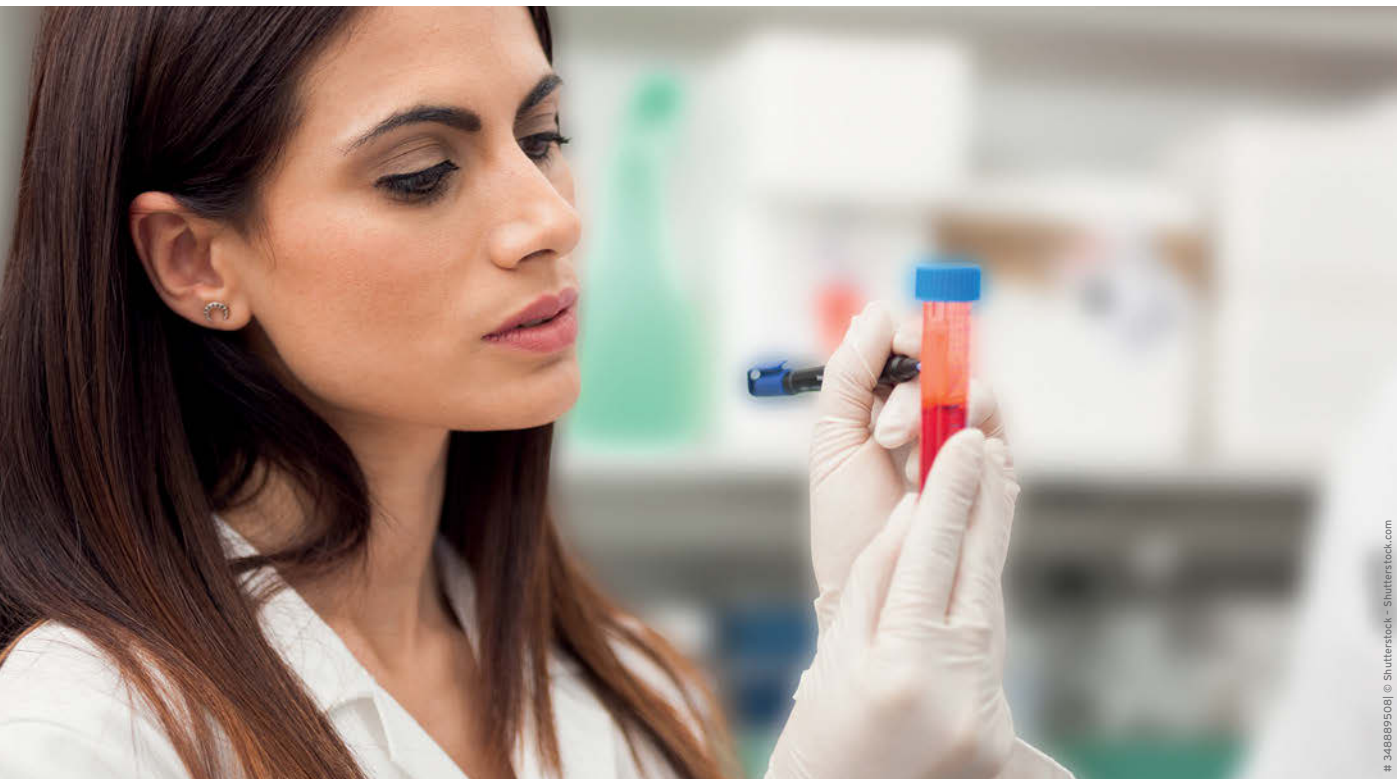

# 34889508 | © Shutterstock - Shutterstock.com

## Hematype®

# Der Segmentbeprobungsadapter für das PLUS an Anwendersicherheit

Das technische Personal in Krankenhäusern und Blutspendezentren ist fast täglich der Gefahr von Verletzungen oder dem Verursachen von Kreuzkontaminationen ausgesetzt. Insbesondere wenn die Probenentnahme für die Blutgruppenbestimmung und Kreuzprobe aus Schlauchsegmenten

mit einer Schere durchgeführt wird. Der Hematype Segmentbeprobungsadapter vermeidet die mit dem Einsatz von Scheren verbundenen Risiken und bietet somit eine sichere, saubere und einfache Alternative.

### Der Hematype Segmentbeprobungsadapter

- ✓ Reduziert das Risiko unkontrolliert austretenden Segmentblutes
- ✓ Eliminiert das Risiko kreuzkontaminierter Blutproben
- ✓ Reduziert das Auftreten von Schnitt- und Stichverletzungen sowie den Kontakt des Personals mit Fremdblut
- ✓ Unterstützt Sie bei der Einhaltung der Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und Rates über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit.
- ✓ Entworfen für 10 mm und 12 mm Kunststoff- und Glasreagenzgläser

## Hematype® In nur drei Schritten zur Segmentblutprobe

### Schritt 1

Probenröhrchen in einen Ständer stellen und Hematype Segmentbeprobungsadapter aufsetzen.



### Schritt 2

Oberen Bereich des Segments mit behandschuhter Hand\* abdecken. Unteres Ende des Segments in den Hematype Segmentbeprobungsadapter einführen und drücken um die Probe zu überführen.

\* Vermeidung von Blutspritzern bei unsauber verschweißtem Segment



### Schritt 3

Entsorgungsempfehlung: Entleertes Segment in Hematype Segmentbeprobungsadapter belassen und beides gemeinsam in einen für biologische Gefahrstoffe zugelassenen Abfallbehälter entsorgen.



## Hematype® Produktinformationen

### Produktübersicht

Artikel	VE*	Art.-Nr.
Hematype®	1000	R6R5128

\*Verpackungseinheit



# wir helfen Menschen

Ihren Einsatz für Therapieerfolg und Lebensqualität möchten wir einfacher und sicherer machen und die Lebensqualität von Patienten und Pflegebedürftigen stetig steigern. Wir übernehmen Verantwortung für hochwertige, individuell abgestimmte Produkte und Dienstleistungen in den Leistungsbereichen:

## **Ernährung**

Für die enterale Ernährung bieten wir Ihnen Trink- und Sondennahrungen sowie Supplemente. Das Programm für die parenterale Ernährung reicht von Mehrkammerbeuteln bis zu Einzelkomponenten wie Fettemulsionen, Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen. Bei unseren therapieübergreifenden, bundesweiten Versorgungsstrukturen setzen wir uns höchste Qualitätsstandards.

## **Arzneimittel**

Für die intravenöse Therapie kritisch kranker Menschen haben wir ein umfangreiches Produktprogramm von generischen Arzneimitteln wie Antibiotika und Anästhetika sowie Arzneimitteln für die Onkologie. Ihre vielfältigen Therapien unterstützen wir mit systematisch abgestimmten Applikationstechniken.

## **Infusionen**

Unser Angebot umfasst Volumenersatz-, Träger- und Elektrolytlösungen sowie spezifische Lösungen für die Pädiatrie in modernen und anwendungsfreundlichen Primärbehältnissen. Wir unterstützen Ihre therapeutische Arbeit durch umfangreiche Dienstleistungen, wie eine computergestützte Kompatibilitätsdatenbank und eine breite wissenschaftliche Basis.

## **Medizinprodukte**

Für Ernährung, Infusionen, Arzneimittel und Blutkomponenten bieten wir Ihnen präzise aufeinander abgestimmte Applikationstechnik und -systeme an. Das Produktprogramm wird durch die Urologie, die Tracheostomie und die moderne Wundversorgung abgerundet.



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH  
Kundenberatung  
61346 Bad Homburg  
T 0800 / 788 7070  
F 06172 / 686 8239  
kundenberatung@fresenius-kabi.de  
www.fresenius-kabi.de