

sanabelle poche de lit U130

Caractéristiques :

- Volume 2000 ml
- Tubulure 120 cm
- Blocage antiretour
- Robinet de sortie
- Stérile

Domaines d'utilisation / Indications :

- Drain urinaire à demeure en relation avec une sonde vésicale transurétrale ou suprapubienne, un préservatif urinoir ou tout autre système interne ou externe de dérivation urinaire.

Connexion et changement :

- Après la pose de la sonde ou du préservatif urinoir, la poche de lit est connectée en conditions stériles.
- La poche de lit est changée en cas de problèmes de fonctionnement ou après 7 jours au plus tard.
- Avant le changement, désinfecter avec une solution de désinfection adaptée la connexion entre la poche et le cathéter urinaire; respecter la durée d'action de la solution.
- Connecter la nouvelle poche en conditions stériles.
- Une fois totalement vidée, la poche usagée peut être évacuée avec les ordures ménagères.

Possibilités de fixation :

- Il faut accrocher la poche verticalement, sous le niveau de la vessie. Éviter le contact avec le sol. Pour la fixation sur la jambe, la poche présente des fentes latérales pour y passer des sangles de fixation.
- Il faut éviter de plier ou d'accrocher la tubulure car cela pourrait entraver l'évacuation de l'urine. Utiliser pour ce faire des pinces de support spéciales.

Vidange :

- La poche doit être vidangée à temps avant que le niveau d'urine n'atteigne le blocage antiretour.
- Pour vidanger, ouvrir le robinet à poussoir. Laisser couler l'urine dans un récipient préparé à cet effet.
- Fermer le robinet de sortie.

Remarques particulières :

- Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.
- Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé ou déjà ouvert.
- Produit à usage unique exclusivement. Évacuer après utilisation. Ce produit ne doit pas être réutilisé ou restérilisé. Une réutilisation est associée à un risque d'infection du patient et/ou de l'utilisateur et pourrait altérer les performances du produit ou même aboutir à un arrêt de son fonctionnement.

Informations de commande

Produit	Unité de commande	N° d'article
sanabelle poche de lit U 130	90	77712801

