

sanabelle poche de lit U170

Caractéristiques :

- Volume 2000 ml
- Tubulure de 110 cm
- Blocage antiretour
- Robinet de sortie
- Emballé individuellement

Domaines d'utilisation / Indications :

- Poche de lit pour collecter l'urine lors de l'utilisation de collecteurs urinaires externes (condom urinaire, par ex.). Pour utilisation en poche de nuit.

Connexion et changement :

- Après la mise en place du collecteur d'urine externe, connecter la poche de lit dans des conditions stériles et vérifier son bon positionnement.
- La poche de lit est changée en cas de problèmes de fonctionnement ou après 14 heures au plus tard.
- Une fois totalement vidée, la poche usagée peut être évacuée avec les ordures ménagères.

Possibilités de fixation :

- Il faut accrocher la poche verticalement, sous le niveau de la vessie. Éviter le contact avec le sol. La poche est équipée d'œillets sur son bord supérieur pour être suspendue.
- Il faut éviter de plier ou d'accrocher la tubulure car cela pourrait entraver l'évacuation de l'urine.

Vidange :

- La poche de lit doit être vidée avant que l'urine n'atteigne le dispositif anti-reflux.
- Pour vider la poche, ouvrir le robinet de vidange en le tirant avec précaution vers le bas. Laisser couler l'urine dans un récipient prévu à cet effet.
- Fermer le robinet de vidange.

Informations de commande

Produit	Unité de commande	N° d'article
sanabelle poche de lit U 170	10	77712860

