

## ボーンマロウコレクションキット使用上のお願い

ボーンマロウコレクションキットのコレクションコンテナ（以下、コンテナ）をボーンマロウコレクションスタンド（以下、専用スタンド）に取り付ける際は、下記の注意事項に従い安全にご使用下さいますようお願い申し上げます。

- ① 本製品のコンテナを専用スタンドに取り付ける際は、添付文書の別紙「ボーンマロウコレクションスタンドへの取付け方法」をご覧ください、コンテナを専用スタンドへしっかりと固定した上で使用して下さい。専用スタンドへの確実な固定がなされなかった場合、専用スタンドからコンテナが外れ骨髄液の消失事故が発生し、患者様へ十分な治療が実施できなくなる恐れがあります。
- ② 骨髄液投入時以外はコンテナのキャップを閉じて下さい。骨髄液の入ったコンテナのキャップを閉めるときは、コンテナをクランプで止め、コンテナ上部を必ず手で押さえ、キャップを閉じて下さい。（但しコンテナのキャップは骨髄液の漏れを完全に防ぐ機能はありませんのでコンテナのキャップの方を下にしないで下さい。）
- ③ コンテナを専用スタンドに設置した状態で、ろ過のために製品を上下する、コンテナを揉むなどの作業を行う場合は、コンテナに負荷がかかり専用スタンドから外れて落下が発生しないよう十分に注意しながらご使用下さいますようお願い申し上げます。（但し専用スタンドに設置したままのろ過作業は本来の使用方法ではありませんのでご施設の責任下で実施して下さい。）
- ④ 製品添付文書をよくご覧の上、専用スタンド取付け時以外も使用方法を十分に確認の上ご使用下さいますようお願いいたします。

使用方法に不明な点などが御座いましたら、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。