



freeflex® adapter (stål/plast).
Varenr. 2870081



Fjern overposen og legg infusjonsposen på bordet. Knekk beskyttelsesvingen på den hvite porten av rett før bruk



Posen holdes loddrett, og deretter trykkes den smale enden av freeflex® adapteren fast på tilsetningsporten



Press og drei hetteglasset med legemiddel i den åpne (brede) enden av adapteren. Drei deretter hetteglasset enda en gang for å sikre gjennomløp. Unngå trykk på posen



Press infusjonsvæsken over i hetteglasset for å løse opp legemidlet



Når legemidlet er oppløst, vendes systemet, slik at hetteglasset er øverst. Trykk sammen og slipp infusjonsposen flere ganger, inntil hetteglasset er tømt



Posen håndteres nå kun ved å holde med fingrene på opphengingshullet. Dette for at unngå tilbaketløp av legemidlet til hetteglasset



Posen med hetteglasset kan nå henges opp